



NORMÁLNÍ	ZVÝŠENÁ
KÓD 18001 1 x 0,5 mL	KÓD 18002 1 x 0,5 mL
SKLADOVAT PŘI 2-8 °C	
Pouze pro laboratorní <i>in vitro</i> diagnostiku	

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Hemoglobin A_{1c} kontrola je určena pouze pro účely kontroly kvality a je dodávána s doporučenými intervaly přijatelných hodnot.

SLOŽENÍ

Hemoglobin A_{1c} kontrola. Pro 0,5 mL. Lyofilizované hemolyzáty lidského původu vhodné ke kontrole kvality v klinických laboratořích. Neobsahuje konzervační látky, které by mohly interferovat s testy.

Komponenty lidského původu byly testovány a shledány negativními na přítomnost protilátek anti-HIV a anti-HCV, stejně jako na HBs antigen. S kontrolami zacházejte jako s potenciálně infekčním materiálem.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

- Velmi opatrně otevřete lahvičku, aby nedošlo ke ztrátě lyofilizovaného materiálu.
- Do lahvičky napipetujte přesně 0,5 mL destilované vody. Hodnoty komponentů závisí na přesnosti tohoto rekonstitučního kroku.
- Uzavřete lahvičku zátkou a nechte ji stát 20 minut při pokojové teplotě.
- Jemně krouživým pohybem zabraňte vzniku pěny, aby došlo ke kompletnímu rozpuštění obsahu.
- Analyzujte rekonstituovaný materiál stejným způsobem jako vzorky pacienta.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při 2-8 °C.
Lyofilizovaná kontrola je stabilní do data expirace uvedeného na štítku.
Komponenty rekonstituovaného materiálu jsou stabilní po dobu nejméně 7 dní při 2-8 °C. Pro delší skladování zamrazte. Vyhněte se opakovanému zmrazování a rozmrazování.

HEMOGLOBIN A_{1c} KONTROLA (NORMÁLNÍ, ZVÝŠENÁ)

SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Koncentrace hemoglobinu A_{1c} je uvedena na štítku lahvičky a vyjádřena v mmol/L a v %. Hodnota je návazná na referenční metodu popsanou IFCC. Sledovatelnost výsledků může být zajištěna pouze v případě použití BioSystems reagentů a doporučených postupů měření.

Navrhované intervaly přijatelných hodnot byly vypočteny z předchozích zkušeností v mezilaboratorní variabilitě a jsou uvedeny pouze pro orientaci. Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní parametry přesnosti.

UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 20.3.2025

Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí. Originální návod, LOT certifikát a bezpečnostní listy jsou k dispozici na internetové adrese: <https://einfo.bio> a na: www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR: JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5,
tel.: +420 257 220 760, paha@jktrading.cz

SK: JK-Trading spol.s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava,
tel.: + 421 264 774 591, jk-trading@jk-trading.sk

V případě mimořádných událostí:

ČR: Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK,
tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK: Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166