



Kód 18053	1 x 1 mL
SKLADOVAT PŘI 2-8 °C	
Pouze pro <i>in vitro</i> diagnostiku v klinických laboratořích	

FERTILITNÍ BIOCHEMICKÁ KONTROLA

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Fertilitní biochemická kontrola je určena pouze pro kontrolu kvality v laboratoři a je dodávána s doporučenými intervaly přijatelných hodnot. Pouze pro profesionální *in vitro* použití v klinické laboratoři.

SLOŽENÍ

Fertilitní biochemická kontrola. Pro 1x1 mL. Lyofilizovaná kontrola obsahující komponenty v koncentracích vhodných ke kontrole kvality v klinických laboratořích. Neobsahuje konzervační látky, které by mohly interferovat s testy.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

1. Velmi opatrně otevřete lahvičku, aby nedošlo ke ztrátě lyofilizovaného materiálu.
2. Do lahvičky napipetujte přesně 1,00 mL destilované vody. Hodnoty komponentů závisí na přesnosti tohoto rekonstitučního kroku.
3. Uzavřete lahvičku zátkou a nechte ji stát 20 minut při pokojové teplotě.
4. Jemně krouživým pohybem zabraňte vzniku pěny, aby došlo ke kompletnímu rozpuštění obsahu. Zabraňte kontaktu rekonstituovaného materiálu se zátkou, aby nedošlo k možné kontaminaci stropovými prvky, které by mohly interferovat s měřením alfa-glukosidázy.
5. Nakládejte s rekonstituovanou fertilitní biochemickou kontrolou jako se sérem pacienta.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při 2-8 °C.
Fertilitní biochemická kontrola je stabilní do data expirace uvedeného na štítku.
Komponenty rekonstituovaného materiálu jsou stabilní po dobu nejméně 15 dní při 2-8 °C. Pro delší skladování zamrazte. Vyhněte se opakovanému zmrazování a rozmrazování.

VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ

Dodržujte běžná opatření požadovaná pro manipulaci se všemi laboratorními reagensy. Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. Likvidace veškerého odpadního materiálu by měla být v souladu s místními směrnici. Jakýkoli vážný incident, který by mohl nastat v souvislosti s produktem, musí být oznámen společnosti BioSystems S.A.

SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Přiřazené hodnoty koncentrací pro komponenty jsou závislé na šarži a jejich sledovatelnost je uvedena v příložených hodnotových listech. Sledovatelnost výsledků může být zajištěna pouze v případě použití BioSystems reagensů a doporučených postupů měření. Navrhované intervaly přijatelných hodnot byly vypočteny z předchozích zkušeností v mezilaboratorní variabilitě a jsou uvedeny pouze pro orientaci. Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní parametry přesnosti.

UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 20.3.2025
Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí. Originální návod, LOT certifikát a bezpečnostní listy jsou k dispozici na internetové adrese: <https://einfo.bio> a na: www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR: JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5,
tel.: +420 257 220 760, paha@jktrading.cz
SK: JK-Trading spol.s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava,
tel.: + 421 264 774 591, jk-trading@jk-trading.sk

V případě mimořádných událostí:

ČR: Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK,
tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02
SK: Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166