



Hladina I	Hladina II
Kód 18054 3 x1 mL	Kód 18066 3 x 1 mL
Pouze pro <i>in vitro</i> diagnostiku v klinických laboratořích	

BIOCHEMICKÁ MOČOVÁ KONTROLA I, II

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Biochemická močová kontrola je určena pouze pro účely kontroly kvality a je dodávána s doporučenými intervaly přijatelných hodnot.

SLOŽENÍ

Biochemická močová kontrola. Pro 5 mL. Lyofilizovaná lidská moč obsahující komponenty v koncentracích vhodných ke kontrole kvality v klinických laboratořích. Neobsahuje konzervační látky, které by mohly interferovat s testy.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

1. Velmi opatrně otevřete lahvičku, aby nedošlo ke ztrátě lyofilizovaného materiálu.
2. Do lahvičky napipetujte přesně 5 mL destilované vody. Hodnoty komponentů závisí na přesnosti tohoto rekonstitučního kroku.
3. Uzavřete lahvičku zátkou a nechte jí stát 20 minut při pokojové teplotě.
4. Jemně krouživým pohybem zabraňte vzniku pěny, aby došlo ke kompletnímu rozpuštění obsahu.
5. Analyzujte rekonstituovaný materiál stejným způsobem jako vzorky pacienta.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při 2-8 °C.
Biochemická močová kontrola je stabilní do data expirace uvedeného na štítku.
Komponenty rekonstituovaného materiálu jsou stabilní po dobu nejméně 7 dní při 2-8 °C. Pro delší skladování zamrazte. Vyhněte se opakovanému zmrazování a rozmrazování.

SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Přiřazené hodnoty koncentrací pro komponenty a jejich sledovatelnost jsou uvedeny v příložených hodnotových listech. Sledovatelnost výsledků může být zajištěna pouze v případě použití BioSystems reagentů a doporučených postupů měření.
Navrhované intervaly přijatelných hodnot byly vypočteny z předchozích zkušeností v mezilaboratorní variabilitě a jsou uvedeny pouze pro orientaci. Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní parametry přesnosti.

UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 20.3.2025

Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí. Originální návod, LOT certifikát a bezpečnostní listy jsou k dispozici na internetové adrese: <https://einfo.bio> a na: www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR: JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5,
tel.: +420 257 220 760, paha@jktrading.cz
SK: JK-Trading spol.s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava,
tel.: + 421 264 774 591, jk-trading@jk-trading.sk

V případě mimořádných událostí:

ČR: Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK,
tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02
SK: Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166