



|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Kód 31075 5 x 1 mL                                               |
| SKLADOVAT PŘI 2-8 °C                                             |
| Pouze pro <i>in vitro</i> diagnostiku v klinických laboratořích. |

## PROTEINOVÝ KALIBRÁTOR

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Biochemický kalibrátor je určen pro kalibraci měřících metod firmy Biosystems specifikovaných v hodnotových listech.

### SLOŽENÍ

**Proteinový kalibrátor.** Tekutá lidská séra obsahující několik proteinů v koncentracích vhodných pro kalibraci postupů měření.

Komponenty lidského původu byly testovány a shledány negativními na přítomnost protilátek anti-HIV a anti-HCV, stejně jako na HBs antigen. Přesto však s nimi zacházejte jako s potenciálně infekčním materiálem.

### PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

Proteinové kalibrátory jsou dodávány připravené k přímému použití. Před otevřením lahvičky vytemperujte na pokojovou teplotu a poté opatrně promíchejte, aby nedošlo ke vzniku pěny. Proteinový kalibrátor analyzujte stejným způsobem jako vzorky pacienta.

### SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při 2-8 °C. Proteinové kalibrátory jsou stabilní do data expirace uvedeného na štítku, pokud jsou skladovány těsně uzavřené a je zabráněno kontaminaci během jejich použití.

### SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Přiřazené hodnoty koncentrací pro komponenty a jejich sledovatelnost jsou uvedeny v příložených hodnotových listech. Sledovatelnost výsledků může být zajištěna pouze v případě použití BioSystems reagentů a doporučených postupů měření. Navrhované intervaly přijatelných hodnot byly vypočteny z předchozích zkušeností v mezilaboratorní variabilitě a jsou uvedeny pouze pro orientaci. Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní parametry přesnosti.

### UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 20.3.2025

Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí. Originální návod, LOT certifikát a bezpečnostní listy jsou k dispozici na internetové adrese: <https://einfo.bio> a na: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)

#### Výhradní distributor:

**ČR:** JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5,  
tel.: +420 257 220 760, [praha@jktrading.cz](mailto:praha@jktrading.cz)

**SK:** JK-Trading spol.s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava,  
tel.: + 421 264 774 591, [jk-trading@jk-trading.sk](mailto:jk-trading@jk-trading.sk)

V případě mimořádných událostí:

**ČR:** Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK,  
tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

**SK:** Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166