

**Název výrobku: CI-AUTOCHECK-KIT II****Zařazení:** typ 2 Bowie-Dick**Typ testu:** arch A6 s indikátorovým obrazcem**Bližší specifikace:** arch s reaktivním inkoustem k použití s filtračním papírem a kovovým rámem**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 121°C/11 minut, 134°C/3,5 minuty**Použití:**

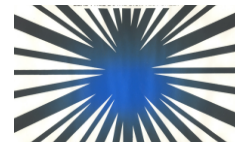
1. Spusťte sterilizační cyklus, abyste sterilizátor zahřáli.
2. Vložte indikátorový list mezi vrstvu filtračních papírů – jedna část balíčku má ustřížený růžek.
3. Označte přeškrtnutím na horním záznamovém archu počet použití (číslo 1 až 15).
4. Vložte složku testovacích papírů s indikátorem do nerez stojánku a svorkami ho na obou koncích uzavřete.
5. Umístěte stojánek vodorovně na dno, do středu prázdné sterilizační komory a co nejbližší ke dveřím, nebo do místa, kde se předpokládá snížená penetrace páry.
6. Odstartujte program Bowie-Dick testu.
7. Po skončení cyklu vyjměte stojánek ze sterilizátoru. POZOR! Stojánek může být horký, pracujte opatrně, použijte rukavice. Po jeho vychladnutí vyhodnoťte indikátorový list, vyplňte předepsané údaje na zadní straně indikátoru a uchovejte ve sterilizačním deníku, mimo zdroje světla.
8. Před dalším použitím nechejte kartonové papíry vyschnout – např. rozhozením jako karty.
9. Pokud je indikátorový list po vyjmutí ze stojánku stále teplý, nepokládejte ho na chladný povrch – může se vrátit k původní barvě.



Před expozicí



Správný výsledek

Nesprávný výsledek -
nedostatečné zbarvení**Vyhodnocení:****Vyhovující cyklus:** celý obrazec indikátoru rovnoměrně změnil barvu z modré na černou.**Nevyhovující cyklus:** obrazec indikátoru se zabarvil nestejně. Případně střed zůstal zcela nezměněn – zůstal modrý. Tento stav signalizuje přítomnost zbytkového vzduchu v komoře sterilizátoru.

Ve výjimečných případech může dojít ke vzniku vzduchových bublin pod laminem indikačního archu. V tomto případě vyhodnoťte změnu barvy, jak je uvedeno výše.

Tmavě modrá barva celého indikátoru značí nedostatečný čas, teplotu, nebo nedostatečný průnik páry.

Pokud je BD zkouška nevyhovující test opakujte. V případě druhého nevyhovujícího výsledku přivolejte servisního technika.

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 15°C - 38°C.

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

Expirace: 3 roky od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN ISO 11140-4**Obsah balení:** 2x karton formát A6 každý pro 15 použití, 30 archů testů**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 5/2023/JK

Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com