

Kód výrobku: SA/5 a SA/6

Distributor:


 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.
 ČR: www.jktrading.cz
 SR: www.jk-trading.sk
Název výrobku: SterilAMP®II-5 a 6**Zařazení:** biologický indikátor typu self-contained pro kontrolu a validaci sterilizace kapalin vlhkým teplem**Typ testu:** biologický**Bližší specifikace:** malé skleněné ampulky obsahující médium sójového digesčního bujónu a brom kresolového purpurového pH indikátoru se spórami *Geobacillus stearothermophilus* kmene 7953, množství 10^5 nebo 10^6 **Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 121°C, 132°C, 134°C a 135°C**Inkubace:** 48 hodin při teplotách 55°C – 60°C**Použití:**

1. Zkontrolujte indikátory, které chcete použít, žádný nesmí být poškozený. Ponechte je 1-2 hodiny temperovat při pokojové teplotě
2. Vložte indikátory do nádoby s tekutinou v množství, které předepisuje národní legislativa. Nádoba musí být stejné velikosti, jako ostatní nádoby s tekutinou, které sterilizujete. Pokud jsou nádoby různé velikosti, měli byste sledovat každou zvlášť.
3. Spusťte obvyklý sterilizační cyklus.
4. Po skončení cyklu vyjměte biologické indikátory umístěte je do inkubátoru. Přidejte i jeden indikátor, který neprošel sterilizačním cyklem, a označte jej „pozitivní kontrola“

Vyhodnocení:**Vyhovující cyklus:** pokud zůstane médium čisté, stejnobarevné, výsledek je uspokojivý, sterilizace byla účinná. Zároveň se ujistěte, že „pozitivní kontrola“ dopadla uspokojivě, že prokázala životaschopnost mikroorganismů. Neexponovaný indikátor se musí projevit zakalením.**Nevyhovující cyklus:** Pokud se médium zakalí nebo pokud se vytvoří sediment, bakterie nebyly sterilizací zneškodněny. V takovém případě se materiál nesmí považovat za sterilní. V případě druhého nevyhovujícího výsledku přivolejte servisního technika. To, že cyklus neproběhl správně, prokáže i „pozitivní kontrola“. Pokud se totiž během inkubace (do 24 – 48 hodin) nepotvrdí životaschopnost mikroorganismů, znamená to, že kontrola biologickými indikátory neproběhla regulérně. Mikroorganismy nebyly aktivní a výsledek je jen falešně negativní.**Poznámka:** Biochemická charakterizace není nutná. Likvidujte podle platné legislativy nebo po dobu 30 minut při teplotě 121°C.**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při chlazení na +2°C - +8°C.POZOR! Nepoužívejte poškozené ampulky ani neúplné indikátory!
Nezmrazujte!**Expirace:** 18 měsíců od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11138-1, 11138-3

Každé balení obsahuje certifikát k příslušné šarži, D-hodnotu i Z-hodnotu.

Obsah balení: 100+10 kusů**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JK

Před expozicí
a
správný výsledek
při kontrole
správnosti
sterilizačního cyklu

Chybný výsledek
při kontrole
sterilizace
a
správný výsledek
při kontrole
životaschopnosti
mikroorganismů

Katalogové číslo	Ks/bal	Druh spor/ denzita	Kultivace
SA/5	100+10	<i>Geobacillus stearothermophilus</i> Kmen ATCC 7953, 10^5	48 hodin při teplotě 55-60 °C
SA/6	100+10	<i>Geobacillus stearothermophilus</i> Kmen ATCC 7953, 10^6	48 hodin při teplotě 55-60 °C



Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com