

Kód výrobku: CI-DHI a CI-DHI/500

Distributor:

 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.
ČR: www.jktrading.cz
SR: www.jk-trading.sk

Název výrobku: Dry Heat Indicator Label

Zařazení: typ 4 vsázkový

Typ testu: chemický

Bližší specifikace: papírový proužek s testovacím polem

Typ sterilizace: proudící horký vzduch/suché teplo

Expozice: 160°C/10 min (+/-2 min) a vyšší

Popis výrobku: papírový proužek s testovacím polem a nápisem DRY HEAT INDICATOR vhodný jako vsázkový test

Procesní charakteristika: Vsázkový test se provádí každý den v naplněné komoře sterilizátoru. Před expozicí je indikátorový obrazec testu zelený, po správné expozici při splněních všech parametrů sterilizace je obrazec tmavě hnědý až černý. Zbytky zeleného zbarvení signalizují nedostatečné splnění podmínek parní sterilizace.

Fyzikální charakteristika: rozměr 31 mm x 19 mm

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 60 % a při pokojové teplotě 15 - 27°C.

Při skladování po expozici chraňte indikátory před přímým slunečním světlem.

Poznámka: nejsou známy žádné látky nebo podmínky, které by mohly ovlivnit zamýšlené použití indikátoru nebo správnou funkci indikátoru. Indikátor neuvolňuje žádné známé toxické látky v takovém množství, které by způsobilo zdravotní riziko pro sterilizovaný materiál před, během nebo po procesu sterilizace.

Expirace: 3 roky od data výroby

Klasifikace: ČSN EN ISO 11140-1

Obsah balení: 1000 ks/500 ks

Aktualizace (datum/iniciály pracovníka): 9/2023/JK



Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com