

Kód výrobku: BD 120

Distributor:

 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.  
ČR: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
SR: [www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)**Název výrobku:** Green Card T**Zařazení:** typ 2 Bowie–Dick**Typ testu:** chemický**Bližší specifikace:** karta potištěná reaktivním inkoustem, jednotlivě v sáčku**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 134°C/3,5 minuty

**Popis výrobku:** zalaminovaná karta po jedné straně potištěná reaktivním inkoustem, který reaguje na přítomnost vlhkého tepla – páry. Dodává se jednotlivě zatavená v sáčku, před použitím je třeba připevnit do otvoru v obalu kovový kroužek. Neobsahuje olovo.

Tento typ Bowie–Dick testu zjišťuje správné odstranění vzduchu a dostatečný průnik páry do sterilizovaného materiálu v parních sterilizátorech.

**Procesní charakteristika:** Bowie–Dick test se provádí každý den v prázdné komoře sterilizátoru. Před expozicí je indikátorový obrazec na archu testu purpurově červený, po správné expozici při splnění všech parametrů sterilizace je obrazec zelený. Zbytky purpurového zbarvení signalizují nedostatečné splnění podmínek parní sterilizace.

**Fyzikální charakteristika:** rozměr karty 90 x 50 x 1 mm

**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 15 - 27°C.

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

**Poznámka:** nejsou známy žádné látky nebo podmínky, které by mohly ovlivnit zamýšlené použití indikátoru nebo správnou funkci indikátoru. Indikátor neuvolňuje žádné známé toxické látky v takovém množství, které by způsobilo zdravotní riziko pro sterilizovaný materiál před, během nebo po procesu sterilizace.

**Expirace:** 2 roky od data výroby

**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN 867-5

**Obsah balení:** 15 ks

**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 8/2023/JK



**Mesa France**  
2 Rue Auguste Fresnel  
69680 Chassieu Cedex – France  
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88  
Email: [mesafrance@mesalabs.com](mailto:mesafrance@mesalabs.com)