

Kód výrobku: I1410

Distributor:



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.czSR: www.jk-trading.sk**Název výrobku: Inkubátor pro EZTesty****Zařazení:** příslušenství k SCBI biologickým indikátorům**Bližší specifikace:** elektrické zařízení – inkubátor – pro inkubaci self contained biologických indikátorů Mesa EZTest: EZS/5, EZS/6, EZTest H2O2, EZTest EO**Typ sterilizace:** pára, H2O2, EO, FORM**Expozice:** 37°C (*Bacillus atrophaeus*) nebo 57-60°C (*Geobacillus stearothermophilus*)**Inkubace:** 48 hodin při teplotě 37°C a 24 hodin při teplotách 55°C – 60°C nebo podle návodu k použití (například pro Smart-Read® indikátory)**Popis výrobku:** 13 zdířek pro umístění indikátorových ampulek o průměru 10,5 mm, LED display, vestavěný teploměr, aktivační (drticí) zdířka, napájení 220 V prostřednictvím adaptéru, pro nepřetržitý provoz**Procesní charakteristika:** účinnost sterilizačního cyklu je podle platné legislativy nutné ověřit biologickými testy. Velmi jednoduchým systémem je použití tzv. self contained biologických indikátorů, které tvoří plastová ampulka s perforovaným víčkem. Uvnitř ampulky je umístěn proužek s nanesenou biologickou populací mikroorganismů – viz výše – a dále skleněná vnitřní ampulka s roztokem živné půdy. Pod víčkem je filtr, který umožňuje penetraci sterilizačního média. Ampulka je opatřena etiketou s procesovým indikátorem a místem pro popis (číslo nebo jiné údaje). Exponované indikátory se aktivují (rozdrcením vnitřní skleněné nádoby s živnou půdou přes vnější plastový plášť) a inkubují v inkubátoru za odpovídajících podmínek společně s jedním indikátorem, který expozicí ve sterilizátoru neprošel (pro kontrolu životaschopnosti použitých mikroorganismů).**Fyzikální charakteristika:** rozměr zdířky odpovídá ampulkám o průměru 10,5 mm a výšce 50,8 mm**Skladování:** na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 10 - 27°C

Při skladování nebo inkubaci chraňte indikátory před přímým slunečním světlem a před vysušením.

POZOR! Nevkládejte poškozené ampulky!

Teplotu kontrolujte v pravidelných intervalech kalibrovaným teploměrem.

Obsah balení: 1 kus**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 8/2023/JK

Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com