

Kód výrobku: PM/100

Distributor:



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)SR: [www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)**Název výrobku:** Releasat® Purple**Zařazení:** biologické indikátory – kultivační půda**Typ testu:** pro použití s biologickým indikátorem**Bližší specifikace:** modifikované kultivační médium na bázi sójového kaseinu pro použití s biologickými indikátory Mesa**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára, H2O2**Expozice:** dle národních standardů**Inkubace:** viz tabulka

**Popis výrobku:** speciální kultivační médium na bázi sójového kaseinu s pH indikátorem bromkresolovou violetí. Je speciálně navrženo pro použití s biologickými indikátory Mesa, dodává se v jednorázových zkumavkách pro snadnou aseptickou manipulaci s výrobkem. Výsledek je vizuální, změnou barvy.

**Procesní charakteristika:** Vybrané biologické indikátory, které prošly sterilizačním cyklem, se vloží asepticky do kultivačního média. Pokud zůstane médium po celou dobu čisté, výsledek je uspokojivý, sterilizace byla účinná

**Fyzikální charakteristika:** Zkumavky o průměru 16 mm, délka 100 mm  
Objem každé 3,6 ml

**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 10 - 27°C.

Při skladování chraňte před přímým slunečním světlem a před vysušením.

**Expirace:** 1 rok od data výroby**Klasifikace:** každá zkumavka obsahuje číslo šarže a datum expirace**Obsah balení:** 100 kusů**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 8/2023/JK

Mesa France  
2 Rue Auguste Fresnel  
69680 Chassieu Cedex – France  
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88  
Email: [mesafrance@mesalabs.com](mailto:mesafrance@mesalabs.com)