

Kód výrobku: SASU/6

Distributor:



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.czSR: www.jk-trading.sk**Název výrobku:** SterilAMP®II „5230“

Zařazení: biologický indikátor typu self-contained pro kontrolu a validaci sterilizace kapalin vlhkým teplem při teplotách do 118°C v malých kontejnerech, pro průmyslové použití

Typ testu: biologický**Bližší specifikace:** skleněné ampulky se spórami *Bacillus subtilis***Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** do 118°C**Inkubace:** 72 hodin při teplotách 37°C

Popis výrobku: malé skleněné ampulky s kultivačním médiem, obsahující spóry *Bacillus subtilis* „5230“, množství 10⁶

Procesní charakteristika: indikátory se vloží do nádoby s tekutinou v množství, které předepisuje národní legislativa. Pokud zůstane médium čisté, čiré, stejnobarevné, výsledek je uspokojivý, sterilizace byla účinná. Neexponovaný indikátor se musí projevit zakalením, zežloutnutím.

Fyzikální charakteristika: průměr 6,5 mm x délka 26 mm
obsah 0,3 ml

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 %, chladte na teplotu +2°C - +8°C

Při skladování chraňte indikátory před přímým slunečním světlem a před vysušením.

Expirace: 15 měsíců od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11138-1, 11138-3

každé balení obsahuje certifikát k dané šarži

Obsah balení: 100 kusů + 10 ks pro „pozitivní kontrolu“**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JK

Katalogové číslo	Ks/bal	Druh spor/denzita	Kultivace
SASU/6	100+10	<i>Bacillus subtilis</i> „5230“ 10 ⁶	72 hodin při teplotě 35-39 °C



Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com