

Kód výrobku: SC613102

Distributor:



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.czSR: www.jk-trading.sk**Název výrobku: Stericlin® Bowie-Dick Helix Test****Zařazení:** typ 2 Bowie-Dick**Typ testu:** chemický**Bližší specifikace:** test pro kontrolu odsávání vzduchu a průniku sterilizačního média v parních sterilizátorech s frakčním vakuem**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 134°C/3,5 minuty**Popis výrobku:** Testovací systémy Stericlin® Bowie-Dick jsou vhodné pro velké sterilizátory podle DIN EN 285 a sterilizátory (typ B) podle DIN EN 13060.**Procesní charakteristika:** Systém se skládá ze zátěžového tělesa (PCD) a indikačního proužku, který je speciálně přizpůsoben pro toto PCD. PCD je vyrobeno z hliníku a má integrovanou spirálu z plastu. Lze použít pro 250 sterilizačních cyklů. Každé PCD je tedy dodáváno s 250 indikačnickými proužky. Sériové číslo (SN) PCD a dodaných indikačnických proužků jsou identické. Při plném průniku páry indikátor změní barvu.**Fyzikální charakteristika:** rozměr balíčku 144 mm x 114 mm**Skladování:** V originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 15-27°C.

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

Poznámka: Nejsou známy žádné látky nebo podmínky, které by mohly ovlivnit zamýšlené použití indikátoru nebo správnou funkci indikátoru. Indikátor neuvolňuje žádné známé toxické látky v takovém množství, které by způsobilo zdravotní riziko pro sterilizovaný materiál před, během nebo po procesu sterilizace.**Likvidace:** Likvidujte společně s kovovým odpadem**Expirace:** viz obal**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1, DIN EN 285, DIN EN 13060**Obsah balení:** 1x PCD + 250 indikačnických proužků**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 5/2023/JK

Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrence@mesalabs.com