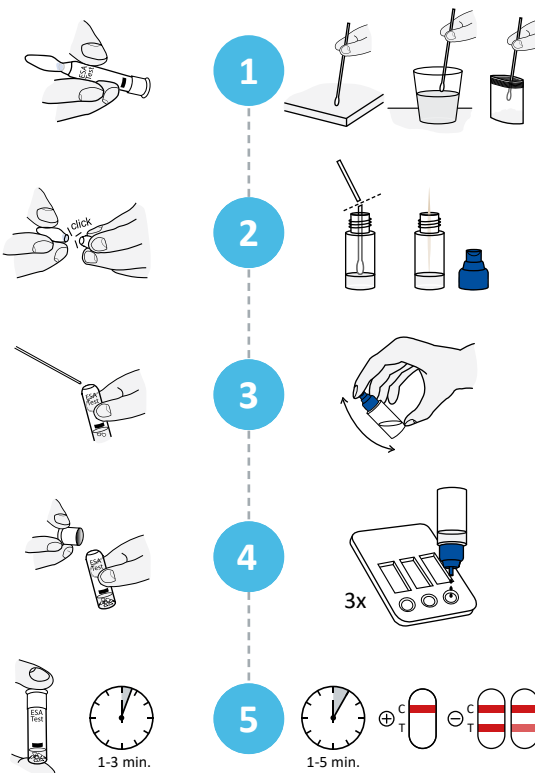


ESA a Tracedetect testování látek

	ESA test	Tracedetect
Princip testu	Chemický	Imunologický
Vyhodnocení	Barevná změna	Vytvoření linie
Senzitivita	0,5 mg (LSD 10-20 µg GHB 0,02 mL)	0,2-8 µg
Specifita	Široká: Detekce chemicky reaktivních skupin	Úzká: Detekce molekulárních struktur
Provedení testu	Jeden krok: Přidat látku	Dva kroky: Rozpustit látku v roztoku, přidat roztok k testu
Doba testování	1-3 minuty	1-5 minut
Skladování	0-40 °C	2-30 °C
Pracovní tepl.	10-40 °C	2-40 °C
Použití	Látky	Povrchy
	Screening	Počáteční potvrzení
Stručný přehled Vašich výhod	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jednoduchý a bezpečný jednokrokový test ✓ Rychlé výsledky během jedné minuty ✓ Jasná indikace barvy pro snadnou interpretaci ✓ Široká škála dostupných produktů 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kapesní formát ✓ Detekuje rezidua na površích ✓ Jednoduchá obsluha ✓ Dodáváno s kolektory vzorků pro všechny metody odběru vzorků a s inkubačním sáčkem pro přepravu v nepříznivých povětrnostních podmínkách

ESA test | Tracedetect


 Rev05.02/XX0742en00001
 Rev02.02/CZ42cz00001

nal von minden

We help you care!

- ✓ Kvalita – DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 13485
- ✓ Poradenství a servis – jsme na Vaší straně po celém světě!
- ✓ Rychlá a spolehlivá logistika – sledované dodání skladového zboží do 1-3 pracovních dnů

Testy pro narkotika

– Na stopě drogám

Testování látek s nal von minden ...můžete se na nás spolehnout!

Úředníci se často setkávají s podezřelými látkami, jejichž složení není známo. Z tohoto důvodu nabízíme ESA testování látek a řadu produktů nal von minden Tracedetect®. Obě testovací metody pracují ruku v ruce, vynikají jednoduchým a bezpečným použitím a poskytují rychlé a spolehlivé výsledky.

ESA testování látek jsou uživatelsky přívětivé, jednodukové testy založené na metodě **chemické detekce**. Jsou schopny detekovat **širokou škálu** omamných látek v neznámých látkách, jako jsou prášky, pilulky a tekutiny, během několika minut.

Společnost ESA Test GmbH je již dlouho známa svými ampulkovými testy, které umožňují detekci a identifikaci drog. Dodáváme konzistentní a spolehlivé produkty, které jsou vyrobeny v Německu, podle nejvyšších standardů kvality.

Řada produktů nal von minden Tracedetect® nabízí propracovaný testovací systém v kompaktním kapesním formátu. Je založena na metodě **imunologického testování** známého pro svou **vysoce citlivou** a **cílenou** detekci téměř neviditelných reziduí na různých površích.

Použití	ESA	Tracedetect	LC-MS/ GC-MS
Screening	X		
Počáteční potvrzení		X	
Potvrzení			X



ESA testování látek – přiznejte barvu

Stručný přehled Vašich výhod:

- ✓ Praktické jednodukové testy
- ✓ Rychlé a spolehlivé výsledky během několika minut
- ✓ Snadné vyhodnocení testu
- ✓ Identifikace látky je indikována jasnou změnou barvy
- ✓ Široká škála detekovatelných látek



Produkt	Obj. č.
Ampulkové testy	
ESA Opiáty/Amfetaminy testování látek	311100
ESA Kokain testování látek	311110
ESA LSD testování látek	311120
ESA Cannabis testování látek	311130
ESA THC/CBD testování látek	311131
ESA CBD testování látek	311132
ESA Extáze/Metamfetamin testování látek	311140
ESA GHB testování látek	311150
ESA Heroin testování látek	311170
ESA Metadon/Ketamin testování látek	311180
ESA Morfin/Heroin testování látek	311210
ESA Buprenorfin testování látek	311220
ESA Efedrin testování látek	311240
ESA GBL testování látek	311250
ESA General Screening testování látek	311331
ESA Syntetický katinon testování látek	311470
ESA Multi testování látek (COC, LSD, KET, OPI/AMP, General Screening)	311490
Stírací test	
ESA Kokain - stírací test	311270

Tracedetect testování látek – vizualizujte narkotika

Stručný přehled Vašich výhod:

- ✓ Vysoce specifické: spolehlivá identifikace pro pozitivní ESA testy
- ✓ Vysoce citlivé: je možná i detekce neviditelných stop
- ✓ Velmi dobře navržený testovací systém v kompaktním kapesním formátu
- ✓ Bezpečné a jednoduché používání
- ✓ Rychlé a spolehlivé výsledky během jedné minuty

Produkt	Obj. č.
Tracedetect Multi 5TAK testování látek Detekovatelné parametry: AMP, COC, MET, MOR/OPI, THC	144352N-10
Tracedetect Multi 5TAC testování látek Detekovatelné parametry: AMP, COC, MDMA, MET, MOR/OPI	144254N-10
Tracedetect Multi 4TD testování látek Detekovatelné parametry: ABP, SPC, THC, UR-144	144243N-10

