

NÁVOD K POUŽITÍ

CROSSTEX
A CANTEL MEDICAL COMPANY



Samolepicí sterilizační sáčky nylon

Návod k použití:

1. Zvolte vhodnou velikost sáčku pro sterilizované předměty.
2. Opatrně vložte nástroje do sáčku a odstraňte přebytečný vzduch.
3. Použijte vnitřní a vnější chemické indikátory suchého tepla nebo biologické indikátory v souladu s pokyny zařízení a místními normami. Pro vaše pohodlí jsou s tímto výrobkem dodávány externí indikátory suchého tepla. Při použití použijte jeden indikátor na vnější stranu sáčku, vyhněte se umístění na místě sváru. Zajistěte, aby indikátor během sterilizace směřoval vzhůru. Barva indikátorů přechází ze zelené na tmavou, když jsou vystaveny sterilizaci suchým teplem.
4. Odstraňte papír z lepicího proužku, rovnoměrně jej přeložte podél perforace a pevně zajistěte. Ujistěte se, že je záložka rovná a bez záhybů nebo pomačkání.
5. Ujistěte se, že obsah sáčku je vzdálen minimálně 1" (2,5 cm) od všech stran sáčku.
6. Postupujte podle pokynů pro sterilizaci podle výrobce sterilizátoru v souladu s národními standardy.
7. Po ukončení cyklu nechte sáčky ve sterilizátoru vychladnout 5-10 minut.




NSP-400, NSP-405
NSP-410, NSP-420
NSP-430



Jednorázové použití.



Není vyroben z přírodního
kaučukového latexu.

 Crosstex International, Inc.
10 Ranick Road, Hauppauge, NY 11788-4209 USA
www.crosstex.com 800.276.7783 631.582.6777

 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.
ČR: www.jktrading.cz
SR: www.jk-trading.sk

Made in USA
NSP-IFU / REV A - 05/2020

Všechny názvy produktů jsou ochrannými známkami společnosti Crosstex International, Inc., a Cantel Medical Company, jejími přidruženými společnostmi nebo spřízněnými společnostmi, pokud není uvedeno jinak. Značky nejsou registrovány ve všech jurisdikcích