



Návod k použití

NÁZEV VÝROBKU :

PMSSteripack krepeový papír, SMMS netkaná textilie archy (standard, netkané, měkké, smms)

POPIS VÝROBKU :

PMSSteripack Krepeové papíry a balicí archy SMMS; Krepeové papíry se dělí do 3 skupin, a to na standardní, měkké a netkané. Standardní a měkké krepeové papíry obsahují celulózu, zatímco netkané výrobky obsahují celulózu i syntetická vlákna. Balicí papíry SMS jsou vyrobeny ze 100% polypropylenového materiálu a koncoví uživatelé je používají v přizpůsobených velikostech . Tyto výrobky jsou v souladu s normami TS EN ISO 11607 a TS EN 868-2.

POUŽITÍ:

Je určen jako sterilizační obal pro jiné zdravotnické prostředky, které mají být sterilizovány zdravotnickými pracovníky.

VÝROBEK	VELIKOST(cm)	KS/BAL
Obalový arch (modrý, zelený, bílý)	30 X 30	2.000
Obalový arch (modrý, zelený, bílý)	40 X 40	1.000
Obalový arch (modrý, zelený, bílý)	45 X 45	1.000
Obalový arch (modrý, zelený, bílý)	50 X 50	1.000
Obalový arch (modrý, zelený, bílý)	60 X 60	500
Obalový arch (modrý, zelený, bílý)	75 X 75	250
Obalový arch (modrý, zelený, bílý)	90 X 90	250
Obalový arch (modrý, zelený, bílý)	100 X 100	250
Obalový arch (modrý, zelený, bílý)	120 X 120	100

NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1- V závislosti na velikosti sterilizovaného materiálu se použije balicí arch vhodné velikosti.
- 2- Typ balicího archu se určí s ohledem na hmotnost a druh materiálu. (Obrázek-1)
- 3- Aby se zabránilo pronikání mikroorganismů a aby byl obal bezpečnější a pevnější, provádí se balení dvěma archy.
- 4- Balení se provádí podle obrázku 2.
- 5- Ostré konce nástrojů zakryjte chráničem nástrojů, aby se zabránilo jejich propíchnutí nebo roztržení.
- 6- Při balení se dává přednost autoklávovým páskám s indikátory.
- 7- Indikátory musí být vloženy I do balíků, aby ověřily jak byla provedena sterilizace



PMS Tıbbi Cihazlar Teknolojisi San. Ve Tic. A.Ş.
Karaduvar Mah. Serbest Bolge, 11.Cad. No.46,
Adres No: 3197520954, Akdeniz | 33020 Mersin/TURKEY
T: +90 324 238 70 42 | F: +90 238 65 49
www.pmsmedikal.com | pms@pmsmedikal.com
MADE IN TURKEY

03.08.2023 / PMS-WPKL-02

26.05.2021 / PMS-WPKL-01



- 8- Balicí archy jsou odolné vůči parní sterilizaci při teplotách 121 °C a 134 °C.
- 9- Balicí archy jsou vhodné pro sterilizaci parou, ethylenoxidem, formaldehydem, plazmou (bez obsahu celulózy) a gama sterilizací.
- 10- Balicí archy jsou určeny k jednorázovému použití. V případě opakování sterilizační operace je třeba obalový materiál vyměnit.
- 11- Po sterilizaci je třeba dbát na to, aby se obaly nepoškodily.
- 12- Sterilizované obaly se skladují ve speciálních místnostech, uchovávají se na policích.
- 13- Obaly musí být uchovávány mimo dosah přímého slunečního světla, vlhkosti a míst s rizikem kontaminace.
- 14- Sterilizované obaly (standardní, netkané, měkké, sms) si při skladování za doporučených podmínek zachovávají bakteriální bariérové vlastnosti po dobu 6 měsíců nebo dle národních uzancí.
- 15- V případě použití obalů se vnější obal nejprve odstraní mimo pracovní prostředí. Poté se vnitřní obal odstraní na pracovišti.

LOT:

Každý obal PMSSteripack Krepový papír a balicí papír SMMS; je opatřen číslem šarže vytištěným na vnitřním štítku obalu a štítku přepravní krabice. Číslo šarže umožňuje sledovat výrobek během výrobního procesu. V případě jakékoli reklamace nebo zpětné vazby je nutné uložit číslo LOT a poskytnout jeho fotografii.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY:

Každý obal PMSSteripack Krepový papír a balicí papír SMMS; musí být skladovány v původním obalu při maximální teplotě. +35 °C a max. 70% relativní vlhkosti vzduchu. Balicí papíry je třeba chránit před přímým světlem, vlhkostí a nadměrnou vlhkostí. Pokud je balicí papír mokrá, dále jej nepoužívejte a zlikvidujte jej podle pokynů.

DOBA POUŽITELNOSTI/EXPIRACE:

- 1- Trvanlivost (použití před sterilizací) krepových papírů PMSSteripack a balicích papírů SMMS je 5 (pět) let od data výroby za doporučených podmínek skladování a manipulace. Výrobek musí být použit do 5 let od data výroby. Datum použitelnosti, stejně jako datum výroby, je vytištěno na vnitřní etiketě obalu a na etiketě přepravního kartonu.
2. Sterilizované obaly (standardní, netkané, měkké, sms) si při skladování za doporučených podmínek zachovávají bakteriální bariérové vlastnosti po dobu 6 měsíců nebo dle národních standardů. Je určena ke sterilizaci přiloženého zdravotnického prostředku a také k zachování sterility přiloženého prostředku až do jeho použití..

Pokud se v souvislosti s výrobkem vyskytne jakákoli závažná událost, musí uživatel informovat výrobce a má právo podat zprávu příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.

POKYNY K LIKVIDACI:

Použité nebo poškozené balicí papíry vhadzujte do autoklávovatelných pytlů na biologický odpad, nikoli do běžných pytlů na odpad.








PMS Tibbi Cihazlar Teknolojisi San. Ve Tic. A.Ş.
Karaduvar Mah. Serbest Bolge, 11.Cad. No.46,
Adres No: 3197520954, Akdeniz | 33020 Mersin/TURKEY
T: +90 324 238 70 42 | F: +90 238 65 49
www.pmsmedikal.com | pms@pmsmedikal.com
MADE IN TURKEY


03.08.2023 / PMS-WPKL-02



Obrázek-1

Krep		Hmotnost do 3 kg (pro dvouvrstvé obaly) Malé a střední velikosti síť, lehké nástroje
Zesílený krep		Hmotnost do 6 kg (dvojitě obaly) Malá chirurgická síť Malá a střední balení nástrojů
Netkaný materiál		Hmotnost do 12 kg (dvojitě obaly) Chirurgická síť, ortopedická síť a balíky Velké a těžké balíky
Prokládaný materiál		Kombinace různých typů a barev materiálů umožňuje použití u jakýchkoliv nástrojů
Prokládaný SMS materiál		Hmotnost až do 15 kg (dvojitě obaly) Ortopedická síť, těžké sety

Obrázek-2

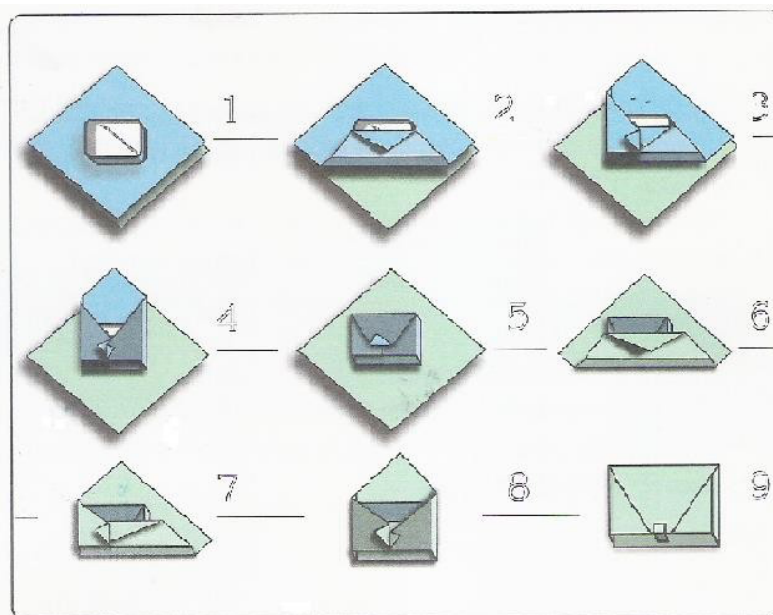

PMS Tibbi Cihazlar Teknolojisi San. Ve Tic. A.Ş.
Karaduvar Mah. Serbest Bolge, 11.Cad. No.46,
Adres No: 3197520954, Akdeniz | 33020 Mersin/TURKEY
T: +90 324 238 70 42 | F: +90 238 65 49
www.pmsmedikal.com | pms@pmsmedikal.com
MADE IN TURKEY

03.08.2023 / PMS-WPKL-02

