

HEp-2 IFA

KÓD 18046 12 x 0.3 mL

ÚVOD

PREVECAL je mezinárodní program externího hodnocení kvality organizovaný společností BioSystems S.A. Tento program pomáhá klinickým laboratořím doplnit jejich systém interní kontroly kvality o objektivní odhad přesnosti jejich postupů měření.

OBSAH

Každá souprava obsahuje 12 kontrolních sér rozdělených do 12 měsíců programu a označených měsícem analýzy.

SLOŽENÍ

PREVECAL HEp-2 IFA. Pro 0,3 ml. Lidské sérum obsahující antinukleární protilátky (ANA) vhodné pro účinné externí hodnocení kvality postupů měření. PREVECAL HEp-2 IFA obsahuje lidské sérum s konzervačními látkami (azid sodný, 0,98 g/l).

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

1. Opatrně otevřete lahvičku označenou příslušným měsícem.
2. Kontrolní séra analyzujte pomocí těch postupů měření, které chcete provést, a s kontrolními séry zacházejte stejně jako se vzorky pacientů.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při teplotě 2-8 °C.

PREVECAL HEp-2 IFA je stabilní do data expirace uvedeného na štítku.

VÝSLEDKY A ZPRÁVY

Jakmile je vzorek analyzován, je třeba zadat výsledky na webovou stránku PREVECAL, www.prevecal.net, po přihlášení pomocí uživatelského kódu a hesla.

Termín pro zadání výsledků je 15. den každého měsíce, s výjimkou ledna, který je prodloužen do 31. dne. Výsledky zadané po termínu se nebudou podílet na výpočtech měsíční zprávy, ale budou se podílet na výpočtu výroční zprávy.

Zprávy lze stáhnout z webových stránek PREVECAL po přihlášení pomocí uživatelského kódu a hesla. Další informace naleznete v uživatelské příručce, která je k dispozici na webových stránkách PREVECAL. V případě jakýchkoli dotazů nebo stížností kontaktujte organizaci prostřednictvím adresy prevecal@biosystems.es.

Výhradní distributor:

ČR: JK-Trading spol.s.r.o., Křivaticová 421/5, 150 21 Praha 5,
tel.: +420 257 220 760, praha@jktrading.cz

SK: JK-Trading spol.s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava,
tel.: + 421 264 774 591, jk-trading@jk-trading.sk

M18046i-02

01/2023

Revize českého překladu: 20.3.2025AK

