

Produktová specifikace

CI-CHEMOSTRIP 134°C/121°C

**Chemický emulátor pro monitorování sterilizace vlhkým teplem.
Monitoruje čas, teplotu i kvalitu páry.**

Kat.číslo a balení

CI-Chemostrip 134°C/121°C 250 ks

Popis a princip testu

CI-Chemostrip 134°C/121°C je určený pro parní sterilizátory s frakcionovaným prevakuum při operačním postupu 4 minuty při 134°C a 10 minut při 121°C. Po expozici parou indikátor změni barvu z fialové po zelenou, což dává ucelenou odpověď a viditelné znamení, že byly splněny podmínky sterilizace.

Klíčové funkce

- 4 minuty při 134°C nebo 10 minut při 121°C
- „Sterilant specific“ – pouze za přítomnosti páry měni barvu
- Bezolovnatý a bez toxických těžkých kovů

Procesní charakteristika

CI-Chemostrip 134°C/121°C měni barvu z fialové po zelenou při expozici párou za sterilizačních podmínek.

Fyzická charakteristika

Rozměry: délka 89 mm x šířka 18 mm

Barevná změna

Z fialové po zelenou

Uváděné hodnoty expozice

- 4 minuty při 134°C
- 10 minut při 121°C.

Skladování

V originálním obalu na suchém místě (relativní vlhkost 10-60 %) a při pokojové teplotě 15-27 °C.

Expirace

2 roky od data výroby. Expirace je uvedena na obalu.

Klasikace dle standardu:

ČSN EN ISO11140-1, Typ 6

Obchodní označení

MesaLabs



Použití:

1. Vložte CI-Chemostrip do sterilizačního obalu s materiálem nebo do kontejneru.
2. Odstartujte příslušný sterilizační program.
3. Po skončení sterilizačního cyklu vyjměte obal, ve kterém je indikátor a vyhodnoťte barevnou změnu indikátoru
4. Zaneste výsledek do sterilizačního deníku.

Hodnocení:

Parametry sterilizace splněny:

Kolečko fialové barvy v pravé části testu **zcela** změnilo barvu z fialové na zelenou = stejnou barvu jako ostatní text.

V případě dlouhé expozice je zelená barva kolečka sytá.

V případě mokré páry je zelená barva „rozpítá“ na okrajích.

V případě krátké expozice je zelená barva kolečka s nádechem do žluta.

Sterilizace nevyhovující:

Kolečko fialové barvy změnilo barvu pouze částečně nebo vůbec ne. V případě krátké expozice změnilo barvu na červeno-hnědou.

Poznámka:

Pro detailnější vyhodnocení indikátoru použijte barevnou vyhodnocovací tabulku.

Návod a další informace ke stažení:

www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR:

JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5, tel.: +420 257 220 760, e-mail: praha@jktrading.cz

SK:

JK-Trading s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava, Kontakt: P.O.BOX 053, Pošta 49, 841 07 Bratislava, tel.: + 421 264 774 591, e-mail: jk-trading@jk-trading.sk

Revize 24.6.2020^{AK}