

I'27W-5

Indikátor termodezinfekce a čištění

Pro rutinní kontrolu procesů termické dezinfekce.



Použití

Určeno pro monitorování procesů dezinfekce vlhkým teplem v pračkách a dezinfekčních zařízeních. Podmínky emulace: 5 min., 90 °C, A₀ = 3000

Příslušná nařízení

Navrženo podle norem systému řízení kvality ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

Charakteristika

- Jednostranně laminovaný proužek potištěný indikátorovým inkoustem, syntetický teplotně stabilní nosič.
- Výchozí barva: zelená.
- Konečná barva: fialová.
- Velikost: 69,5 mm x 30 mm.
- ve 100 % neobsahuje žádné toxické těžké kovy



Výrobní podmínky

Teplota= 15-30 °C, Vlhkost vzduchu 30-80 %.

Podmínky skladování

Skladujte v chladničce při teplotě 0 °C až 4 °C, relativní vlhkost vzduchu = 30-80%.

Uchovávejte mimo dosah přímého světla. Skladování při teplotě do 25 °C je možné po dobu maximálně 15 dnů.

Přepravní podmínky

Podmínky skladování by měly být přísně dodržovány.

Výrobky by měly být přepravovány v uzavřených a vyztužených krabicích, aby se zabránilo jejich poškození. Přeprava tohoto výrobku nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví. Výrobek může být během přepravy uchováván při teplotě nižší než 25 °C po dobu až 15 dnů.

Doba použitelnosti

5 let od data výroby

Balení

200 kusů v sáčku z hliníkové fólie.

Značení

Na obalu výrobku: kód a popis výrobku, informace o výrobcu, podmínky skladování, obchodní úprava, podmínky použití, číslo šarže, datum výroby, datum použitelnosti, čárový kód a datový kód..

Možnosti využití

Zdravotnictví a průmysl.

Ostatní důležité informace

Před použitím si důkladně přečtěte návod.

Bezpečnostní opatření

Výrobek skladujte v původním obalu, mimo dosah světla, dezinfekčních prostředků, plynů a vlhkosti.

Při nevhodných skladovacích podmínkách mohou být výsledky chybné. Nevlhčete.

Výrobek nepoužívejte opakovaně.



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.cz

SR: www.jk-trading.sk

Překlad: 4/2023/JK

Otra información relevante

Antes de su utilización se recomienda leer las instrucciones de uso del producto.

Precauciones

Almacenar el producto en su envase original, alejado de la luz, desinfectantes, gases y humedad.

El almacenamiento en condiciones inadecuadas de conservación puede arrojar resultados erróneos.

No mojar.

No reutilice este producto.