

**Název výrobku: Helix – PCD + Chemical Indicator test strips Kit****Zařazení:** typ 2 pro speciální zkoušky

Typ testu: Helix - PCD + Chemical Indicator test strips Kit byl navržen pro monitorování procesů plazmové sterilizace.

**Bližší specifikace:** plastové tělísko pro uložení testovacího proužku s testovací skvrnou z chemického inkoustu, průměr dutinky je 2 mm a délka 1,2 m nebo 0,25 m**Typ sterilizace:** plazma/páry peroxidu vodíku**Expozice:** ve všech známých typech plazmových sterilizátorů**Použití:**

1. Odtraňte uzávěr se závitem.
2. vložte do komůrky tělíška indikátor – reaktivní inkoust musí směřovat k hadičce; vyvarujte se složení proužku v místě, kde je nanesen inkoust. POZOR: vyvarujte se kontaktu chemického indikátoru s vnitřním povrchem tělíška, mohlo by dojít k ovlivnění výsledku.
3. Zašroubujte uzávěr.  
POZOR: tělíško nikdy nevkládejte do látkového sáčku, proces testování by mohl být ovlivněn, látkový sáček je určen pouze pro parní sterilizaci. Společnost Terragene® doporučuje používat systém Chemdye® Helix-PCD pro malé sterilizátory.
4. Spusťte sterilizační cyklus.
5. Po ukončení cyklu vyjměte tělíško, z něj testovací proužek a výsledek vyhodnoťte.

**Vyhodnocení:****Vyhovující cyklus:** pokud se všechna políčka zbarvila z původní fialové až modré na zelenou barvu, je výsledek úspěšný.**Nevyhovující cyklus:** pokud není některé z políček indikátoru (nebo všechna) zbarveno po celé ploše na zelenou, není výsledek správný, došlo k nedostatečnému splnění podmínek a cyklus musí být opakován.**Skladování:** V originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 30 - 80 % a při pokojové teplotě 10°C -30 °C. Pozor na přítomnost sterilizačních agens v místě skladování indikátorů před expozicí! Může být ovlivněn výsledek.

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem i jinými sterilizačními agens.

**Expirace:** 5 let od data výroby, viz obal


Nepoužívejte výrobek po uplynuté doby použitelnosti

**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1**Poznámka:** bez obsahu toxických látek ani těžkých kovů.**Obsah balení:** 1 ks tělíška + 100 indikátorových proužků**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 10/2024/JK

Před expozicí



Po expozici – nesprávné zbarvení

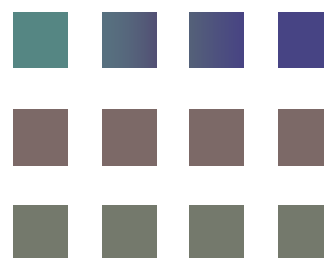

Po expozici – správné zbarvení



Terragene S.A.  
Ruta Nacional Nº 9, Km 280 -  
CP 2130.  
Parque Industrial Micropi-  
Alvear-Santa Fe-Argentina

POZNÁMKA: Kalibrace obrazovky elektronických zařízení (PC, tablet, mobilní telefon) a světlo prostředí mohou narušit zobrazení barev. Společnost Terragene® nezaručuje, že barvy, které vidíte na obrazovce, jsou 100% reálné.