

Kód výrobku: PCD-A-7.OY

Distributor:  Distributor: JK – Trading spol. s r.o.  
ČR: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
SR: [www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)**Název výrobku: Helix – PCD Chemical strips****Zařazení:** typ 2 pro speciální zkoušky**Typ testu:** Helix – PCD, vsázkové testy**Bližší specifikace:** chemické proužky pro použití s Helix - PCD**Typ sterilizace:** parní / vlhkým teplem**Expozice:** 7 min/134°C, 20 min/121°C**Použití:**

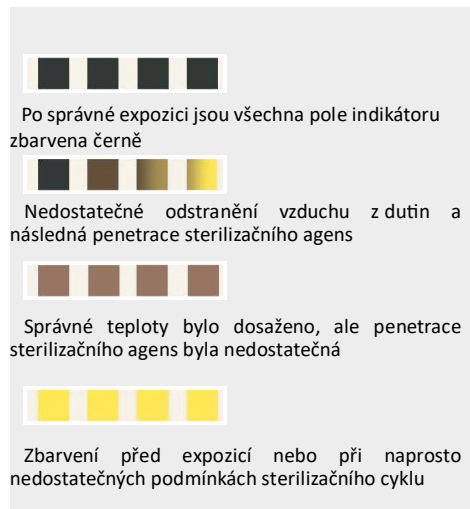
1. Odstraňte uzávěr tělíska.
2. Vložte do komůrky nebo víčka tělíska indikátor
3. Zašroubujte uzávěr.  
POZOR: pole indikátoru směřují do dutiny;  
Nikdy nepřehýbejte v místě, kde je nanesena chemická látka
4. Spusťte sterilizační cyklus.
5. Po ukončení cyklu vyjměte tělísko, z něj testovací proužek a výsledek vyhodnoťte.

**Vyhodnocení:****Vyhovující cyklus:** pokud se všechna políčka zbarvila z původní žluté na černou barvu, je výsledek úspěšný.**Nevyhovující cyklus:** pokud není některé z políček indikátoru (nebo všechna) zbarveno po celé ploše na černou, není výsledek správný, došlo k nedostatečnému splnění podmínek a cyklus musí být opakován.**Skladování:** V originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 30 - 80 % a při pokojové teplotě 10°C -30 °C. Pozor na přítomnost sterilizačních agens v místě skladování indikátorů před expozicí! Může být ovlivněn výsledek.

Při skladování po expozici chraňte indikátory před přímým slunečním světlem i jinými sterilizačními agens.

**Expirace:** viz obal

Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby použitelnosti

**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1**Poznámka:** bez obsahu toxických látek ani těžkých kovů.**Obsah balení:** 250 indikátorových proužků**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 10/2023/JK

Terragene S.A.  
Ruta Nacional Nº 9, Km 280 -  
CP 2130.  
Parque Industrial Micropi-  
Alvear-Santa Fe-Argentina