

Název výrobku: CI-BlackCheck C**Zařazení:** typ 4 vsázkový**Typ testu:** chemický**Bližší specifikace:** zalamínovaný papírový proužek s testovacím polem ve tvaru písmene V, které se zbarví ze žluté na černou**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 121°C/10 min, 134°C/3,5 min**Použití:**

1. Umístěte indikátor do kontejneru s nástroji, pokud jej používáte jako vsázkový, dejte jej do obalu, ve kterém sterilizujete nástroje, a umístěte do plně sterilizační komory v množství, stanoveném platnou legislativou.
2. Spustěte sterilizační cyklus.
3. Po skončení cyklu vyjměte indikátor z obalu a vyhodnoťte vsázku.
4. Výsledky zaznamenejte do dokumentace.

Vyhodnocení:**Vyhovující cyklus:** pokud se zbarví pole indikátoru ze žluté na jednolitou černou (nebo tmavě hnědou – viz vyhodnocovací tabulka) podle vzoru na šipce, sterilizace byla úspěšná**Nevyhovující cyklus:** obrazec indikátoru se zbarvil nestejně nebo jen částečně, nebo barva neodpovídá vzoru na indikátorové šipce – viz tabulka. Tento stav signalizuje přítomnost zbytkového vzduchu v komoře sterilizátoru.

Ve výjimečných případech může dojít ke vzniku vzduchových bublin pod laminem indikačního archu. V tomto případě vyhodnoťte změnu barvy, jak je uvedeno výše.

Světle nebo tmavě zelená či šedá barva indikátoru značí nedostatečný čas, teplotu, nebo nedostatečný průnik páry.

Pokud je zkouška nevyhovující, test opakujte. V případě druhého nevyhovujícího výsledku přivolejte servisního technika.

Upozornění: Sušící fáze může po delší době, než 5 minutách, způsobit jinou barvu a zmást tak správnost vyhodnocení!

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 60 % a při pokojové teplotě 15°C - 27°C.

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

Expirace: 3 roky od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN ISO 15882**Obsah balení:** 250 ks**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JK

Před expozicí



Správný výsledek



Sterilizace úspěšná podmínky sterilizace splněny



Sterilizace úspěšná – příliš vysoká teplota



Sterilizace úspěšná – mokrá pára



CHYBA



Sterilizace neúspěšná-sterilizační parametry nevyhovující



Sterilizace neúspěšná (nedostatečný tlak / krátký čas expozice / nízká teplota)



Sterilizace neúspěšná (nedostatečný tlak / krátký čas expozice/ nízká teplota)



Mesa France
 2 Rue Auguste Fresnel
 69680 Chassieu Cedex – France
 Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
 Email: mesafrance@mesalabs.com