

Název výrobku: Green Card T**Zařazení:** typ 2 Bowie-Dick pro malé parní sterilizátory**Typ testu:** jednorázová karta s indikátorovým potiskem**Bližší specifikace:** karta s naneseným indikátorovým obrazcem, uzavřená ve speciální obalu (ochrana před nadměrnou vlhkostí)**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára, MPS (malé parní sterilizátory)**Expozice:** 134°C/3,5 minuty**Použití:**

1. Spustíte sterilizační cyklus, abyste sterilizátor zahřáli.
2. Provedete kovový kroužek otvorem v horní části obalu. Působí jako těžítka.
3. Umístíte balíček vodorovně na dno, do středu prázdné sterilizační komory a co nejbližší ke dveřím, nebo do místa, kde se předpokládá snížená penetrace páry, potíštěnou stranou směrem nahoru.
4. Odstartujete program Bowie-Dick testu při 134°C na 3,5 min.
5. Po skončení cyklu vyjměte test ze sterilizátoru a ihned vyhodnoťte. POZOR! Může být horký, pracujte opatrně, použijte rukavice. Ihned vyhodnoťte indikátorovou kartu, vyplňte předepsané údaje a uchovejte ve sterilizačním deníku, mimo zdroje světla.

Vyhodnocení:**Vyhovující cyklus:** celý obrazec indikátoru rovnoměrně změnil barvu z purpurové na zelenou.**Nevyhovující cyklus:** obrazec indikátoru se zabarvil nestejně. Případně střed zůstal zcela nezměněn – zůstal purpurový. Tento stav signalizuje přítomnost zbytkového vzduchu v komoře sterilizátoru.


Ve výjimečných případech může dojít ke vzniku vzduchových bublin pod laminou indikačního archu. V tomto případě vyhodnoťte změnu barvy, jak je uvedeno výše.

Purpurová barva celého indikátoru značí nedostatečný čas, teplotu, nebo nedostatečný průnik páry.


Pokud je BD zkouška nevyhovující test opakujte. V případě druhého nevyhovujícího výsledku přivolejte servisního technika.

Upozornění: Sušicí fáze může po delší době, než 5 minutách, způsobit hnědou barvu a zmást tak správnost vyhodnocení!**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 15°C - 27°C.


Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

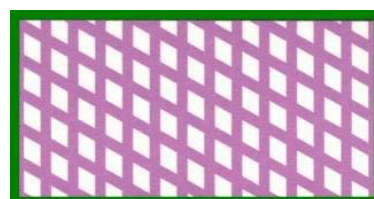Expirace: 2 roky od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN 867-5**Obsah balení:** 15 ks**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 8/2023/JK

Před expozicí

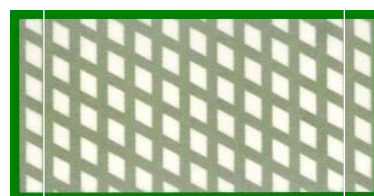

Správný výsledek

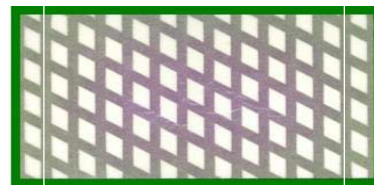

Nesprávný výsledek, chyba



Mesa France
 2 Rue Auguste Fresnel
 69680 Chassieu Cedex – France
 Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
 Email: mesafrance@mesalabs.com