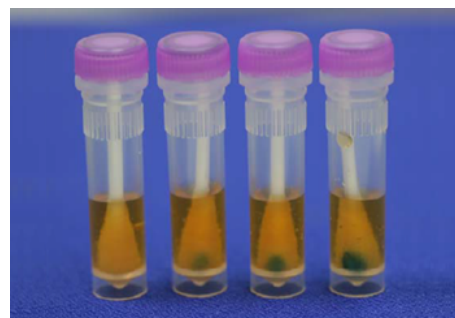


**Název výroku: Pyromol test****Zařazení:** test účinnosti mytí /čištění**Typ testu:** detekce reziduí bílkovin na chirurgických nástrojích či jiných povrchích**Bližší specifikace:** lahvička s reagentií a stěrový tampon, detekční limit 0,1 µg pro detekci nerozpustného proteinového rezidua, které vzniká denaturací bílkovin vlivem glutaraldehydu, kyseliny peroctové a chlorových preparátů. Metoda navázání barviva při analytickém stanovení množství proteinů. Bez inkubace. Neinterferuje s glutaraldehydem a kyselinou peroctovou.**Typ mytí:** ruční nebo strojové (MDZ)**Použití:**

1. Vyjměte testovací ampulku z chladničky, pokud ji tam skladujete, a ponechtejete temperovat na pokojovou teplotu. Používejte rukavice! Kůže rukou je pokryta proteiny!
2. Vlhké plochy setřete suchým tamponem, pokud jsou plochy suché, navlhčete stěrový tampon kapkou sterilní vody
3. Důkladně setřete referenční plochu nástroje nebo jiné testované plochy, zaměřte se na štěrby a klouby
4. Tampon vložte do ampulky s reagentií, uzavřete a protřepejte.
5. Po deseti minutách odečtěte výsledek a zaznamenejte jej do dokumentace

**Vyhodnocení:** pokud zůstane barva tekutiny žlutá a ani tampon nezmění barvu, je výsledek negativní a na nástroji nebyla detekována žádná rezidua bílkovin. Mycí cyklus proběhl v pořádku.

Jakékoliv zabarvení do modra detekuje zbytky bílkovin na nástroji, resp. na referenční ploše, v množství alespoň 0,1 µg. Velké množství může zbarvit celou reakční směs.

**Důležitá upozornění:** uchovávejte v původním obalu, zabraňte znečištění tamponu před použitím, výsledky by mohly být zkreslené. Stěrové tampony před používáním udržujte suché! Kontakt s pokožkou může výsledky do značné míry zkreslit! Test proveďte ihned po provedení stěru, aby nemohlo dojít ke zkreslení výsledku. Kontakt s alkalickými látkami může poskytnout falešně pozitivní výsledek. Doporučuje se provést pozitivní i negativní kontrolu šarže, abyste ověřili správnost testovací sady například stěrem testovací skvrny TOSI testu.**Skladování:** v uzavřeném originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10-60 % a při teplotě 2°C - 25°C. Chraňte před vlivem chemikálií, před nadměrnou vlhkostí, před přímým světlem, znečištěním a teplem**Expirace:** 18 měsíců**Uvolňování toxických látek:** žádné, které by mohly ohrozit zdraví nebo vlastnosti výrobku.**Obsah balení:** 20 ks**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 5/2024/JKPEREG GmbH  
Porschestraße 12  
D-84478 Waldkraiburg  
+49 8638 84100