

Kód výrobku: **8293, 8294, 82920, 82921**
82922, 82923, 82924

Distributor:

 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.
 ČR: www.jktrading.cz
 SR: www.jk-trading.sk

Název výroku: Swab-Aluminium a EndoSwab

Zařazení: test účinnosti mytí/sušení chirurgických nástrojů s dutinami

Typ testu: detekce reziduí vody nebo bílkovin – volitelné příslušenství – stěrové tampony pro použití v dutinách nástrojů

Bližší specifikace: stěrové tampony/štetičky pro použití s testy HydroCheck, HemoCheck nebo Pyromol E

Typ mytí: ruční nebo strojové (MDZ)

8293	Swab-Aluminium - 1,0mm	Materiál hliník, délka 14,5 cm	12 ks
8294	Swab-Aluminium - 2,5mm	Pružný plast, délka 14,8 cm	10 ks
82920	EndoSwab -1,1mm	Pružný plast, délka 230 cm	10 ks
82921	EndoSwab -1,7mm	Pružný plast, délka 230 cm	10 ks
82922	EndoSwab -2,8mm	Pružný plast, délka 230 cm	10 ks
82923	EndoSwab -3,8mm	Pružný plast, délka 230 cm	10 ks
82924	EndoSwab -5,0mm	Pružný plast, délka 230 cm	10 ks

Použití:

1. Pro detekci reziduí vody setřete povrch nástroje suchým tamponem/štetičkou
2. Pro detekci reziduí bílkovin nejprve tampon/štetičku navlhčete kapkou sterilní vody
3. Otřete důkladně část nástroje
4. **POZOR!** Používejte rukavice! Lidská kůže je vlhká a pokrytá proteiny a výsledek by mohl být zkreslený.
5. Stěrový tampon dále použijte s odpovídajícím typem testu
6. Držte se návodu k použití konkrétního typu testu a výsledek vyhodnoťte podle instrukcí v návodu

Důležitá upozornění: uchovávejte v původním obalu, zabraňte znečištění výrobku před použitím, výsledky by mohly být zkreslené


Skladování: v uzavřeném originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10-60 % a při teplotě 2°C - 25°C. Chraňte před vlivem chemikálií, před nadměrnou vlhkostí, před znečištěním

Expirace: bez omezení, nepoužívejte poškozený výrobek

Uvolňování toxických látek: žádné, které by mohly ohrozit zdraví nebo vlastnosti výrobku.

Obsah balení: viz tabulka

Aktualizace (datum/iniciály pracovníka): 9/2023/JK

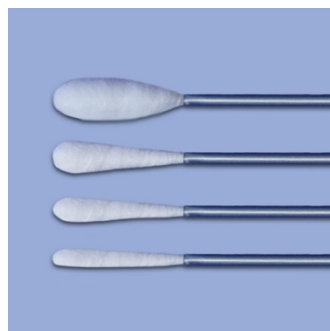

PEREG GmbH
 Porschestraße 12
 D-84478 Waldkraiburg
 +49 8638 84100