

KONTROLA ČIŠTĚNÍ

popis výrobku

Moderní indikátory pro rutinní kontrolu účinnosti mycích procesů v mycích a dezinfekčních zařízeních různých typů. Clean Control indikátory jsou nepostradatelným pomocníkem v každodenním provozu při předsterilizační přípravě zdravotnických prostředků k následné dezinfekci nebo sterilizaci a jsou koncipovány podle normy EN ISO 15883-1:2010. Tmavě červená skvrna indikátoru obsahuje mimo jiné dva typy proteinů, lipidy a polysacharidy a simuluje zbytky krve. Je nanášena na plastovém nosiči o velikosti 70 x 26 mm ve tvaru čtverce 10 x 10 mm. Způsob, jakým je testovací skvrna nanášena, umožňuje kontrolu mycích procesů v kritické fázi.

Test se používá společně s držákem, který část skvrny zakrývá a tak napodobuje kritické podmínky při přeložení nástrojů a pod.

Nízké náklady na pořízení testů umožňují časté používání – doporučuje se každodenní použití společně s plnou vsázkou a vždy po technickém zásahu (po údržbě, opravě). Informace jsou k dispozici v AJ, na obalu jsou uvedeny základní údaje jako číslo normy, LOT a kód výrobku, datum výroby a datum expirace. V každém balení najdete návod pro vyhodnocení testu.

aplikace a vyhodnocení

Vložte indikátor do držáku a složenou sadu pak umístěte do komory mycího zařízení, například do síta s nástroji, nejlépe do míst, která výrobce označil jako kritická. Doporučuje se rovněž umístění testu v držáku v komoře měnit, abyste postupně otestovali účinnost mytí v celé mycí komoře. Po ukončení cyklu zkontrolujte výsledek. Pokud bylo dosaženo správných mycích parametrů, celá testovací skvrna bude kompletně odmyta. Jakákoliv rezidua červeného zbarvení znamenají nedostatečnou účinnost. Doporučuje se výsledky uchovat.

použití

Standardní mycí a dezinfekční zařízení včetně ultrazvukových čističek od různých výrobců a o různých velikostech mycí komory.



holder for Clean Control test



Normy

ISO 15883-1_2010
2017/745 (MDR)

Skladování a expirace

Skladujte na suchém, chladném místě, při teplotě do 30 °C
doba použitelnosti 2 roky od datum výroby.

Označení a obsah balení

CCS-100 100 ks /bal
WCS102 1 ks/ bal

Sterilization & Washing Solutions



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.cz

SR: www.jk-trading.sk

Zpracoval: 1/2024/JK