

KONTROLA MYTÍ

Indicator pro kontrolu mycích procesů

popis výrobku

Moderní mycí indikátor pro strojní čištění, který se používá pro rutinní kontrolu procesů strojního čištění v automatických mycích a dezinfekčních zařízeních různých druhů. Indikátory kontroly mytí jsou neodmyslitelným prvkem každodenní rutinní kontroly procesů mytí podle normy EN ISO 15883-1:2010. Tmavě červená indikační látka simuluje zbytky zaschlé krve a je umístěna na plastovém nosiči ve tvaru dvou čírných čtverců. Způsob, jakým byla indikační látka umístěna, pomáhá kontrolovat proces čištění na dvou kritických plochách současně. Indikátory by měly být používány se speciálním držákem, který navíc ztěžuje kontakt čisticího prostředku s indikační látkou. Nízké náklady na monitorování mycího procesu umožňují časté používání indikátorů kontroly mytí; doporučuje se používat je alespoň jednou denně při prázdné náplni a pravidelně během dne při plné náplni. Kontrolu mycího procesu se doporučuje provádět vždy po technické údržbě mycího zařízení. Indikátor je zřetelně označen názvem výrobku, platnou normou a číslem šarže.

aplikace a vyhodnocení

Umístěte indikátor do speciálního držáku rovnoměrně po celé jeho ploše. Poté držák s indikátorem vložte do komory myčky-dezinfektoru: Například do síta s nástroji na místo, které je pro zvolený model mycího zařízení považováno za nejkritičtější. Po správně provedeném procesu čištění by měla být indikační látka červené barvy zcela odstraněna. Zbytky indikační látky ukazují na neúčinné čištění. Doporučuje se uchovávat výsledek indikační látky jako záznam pro účely sledovatelnosti.

použití

Mycí a dezinfekční zařízení různých výrobců, různých velikosti mycí komory



Před expozicí



Po úspěšném použití

Normy	Skladování a expirace	Značení a obsah balení
ISO 15883-1_2010 2017/745 (MDR)	Skladujte na suchém, chladném místě, při teplotě do 30 °C doba použitelnosti 2 roky od datum výroby.	WCS-100: 100 ks/bal WCS1: 1 ks/bal