

Biologický indikátor SIMICON TEX pro dezinfekční procesy textilií

Informace o výrobku

Účel použití: SIMICON TEX je biologický indikátor, který je určen k validaci a rutinnímu monitorování čisticích a dezinfekčních procesů v pračkách pro dezinfekci textilu..

Vlastnosti: Indikátory SIMICON TEX obsahují populace *Enterococcus faecium* a jsou kontaminovány testovací půdou podle ISO 15883.

Shoda: Biologický indikátor SIMICON TEX v souladu s požadavky DGHM, RKI a VAH..

Specifikace: *Organismus: Enterococcus faecium*
Populace (cfu): $\geq 10^7$ Carrier:
fil.papír
balení: rozpustná textilie/fólie
organická zátěž: defibr. Ovčí krev
Použitelnost: 6 měsíců od data výroby

Skladování: + 4 °C to + 8 °C

Likvidace: Po dezinfekci

Obsah bal.: 10 pcs

Obj.kód: BI-TEX-15001-E

Příklad použití:

1. Pro hodnocení výkonnosti procesů v pračkách pro dezinfekci textilu se perou biologické indikátory (nosič v obalu z rouna/fólie) spolu s průměrnou zátěží. Doporučuje se použít speciálně označený sáček na prádlo, aby bylo možné indikátory následně snadněji najít. Jeden indikátor je určen k ověření růstového výkonu po přepravě a expedici.
Tento referenční indikátor neperte.
2. Zkontrolujte vybraný program. Spusťte program.
3. Po skončení programu asepticky vyjměte indikátory a vložte je odděleně do přiložených sáčků..
4. Inkubace: (např. inkubace se selektivním živným médiem pro enterokoky) 4 dny při teplotě 35 °C ± 2 K.
5. Denně kontrolujte růst všech zkumavek a zejména specifický růst testovaného organismu..
6. Zaznamenejte si výsledky. Výsledky jsou platné pouze v případě, že kontrola růstu vykazuje typický růst.owth.