

Kód výrobku: AUTOCHECK-KIT II

Distributor:



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.czSR: www.jk-trading.sk**Název výrobku:** CI-AUTOCHECK-KIT II**Zařazení:** typ 2 Bowie–Dick**Typ testu:** chemický**Bližší specifikace:** arch s reaktivním inkoustem v sadě s kartonovými listy**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 121°C/11 minut, 134°C/3,5 minuty

Popis výrobku: dva balíčky kartonových papírů (se záznamem počtu cyklů) ve formátu A6. Každý pro 15 opakovaných použití a 30 ks indikačních listů. K provedení zkoušky je nutný kovový stojánek kat.č. 74651 z nerezavějící oceli. Neobsahuje olovo.

Tento typ Bowie–Dick testu zjišťuje správné odstranění vzduchu a dostatečný průnik páry do sterilizovaného materiálu v parních sterilizátorech.

Procesní charakteristika: Bowie–Dick test se provádí každý den v prázdné komoře sterilizátoru. Před expozicí je indikační obrazec na archu testu modrý, po správné expozici při splnění všech parametrů sterilizace je obrazec černý. Zbytky modrého zbarvení signalizují nedostatečné splnění podmínek parní sterilizace.

Fyzikální charakteristika: rozměr balíčku 144 mm x 114 mm

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 15 - 38°C.

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

Poznámka: nejsou známy žádné látky nebo podmínky, které by mohly ovlivnit zamýšlené použití indikátoru nebo správnou funkci indikátoru. Indikátor neuvolňuje žádné známé toxické látky v takovém množství, které by způsobilo zdravotní riziko pro sterilizovaný materiál před, během nebo po procesu sterilizace.

Expirace: 3 roky od data výroby

Klasifikace: ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN ISO 11140-4

Obsah balení: 2x karton formát A6 každý pro 15 použití, 30 archů testů

Aktualizace (datum/iniciály pracovníka): 5/2023/JK



Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com