

Kód výrobku: BD-CHECK II

Distributor:



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.czSR: www.jk-trading.sk**Název výrobku:** CI-BD-CHECK II**Zařazení:** typ 2 Bowie–Dick**Typ testu:** chemický**Bližší specifikace:** jednorázový balíček s filtračním papírem a archem velikosti A6 s reaktivním inkoustem**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 134°C/3,5 minuty

Popis výrobku: balíček o velikosti A6; obsahuje sadu filtračního papíru a uprostřed arch indikačního archu s nánosem reaktivního inkoustu v modrém čárovém obrazci. Během expozice se barva čárového obrazce změní. Tento typ Bowie–Dick testu zjišťuje správné odstranění vzduchu a dostatečný průnik páry do sterilizovaného materiálu v parních sterilizátorech.

Procesní charakteristika: Bowie–Dick test se provádí každý den v prázdné komoře sterilizátoru. Před expozicí je indikačtorový obrazec na archu testu modrý, po správné expozici při splnění všech parametrů sterilizace je obrazec černý. Zbytky modrého zbarvení signalizují nedostatečné splnění podmínek parní sterilizace.

Fyzikální charakteristika: rozměr balíčku 144 mm x 114 mm

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 15 - 38°C.

Při skladování indikačtorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

Poznámka: nejsou známy žádné látky nebo podmínky, které by mohly ovlivnit zamýšlené použití indikačtoru nebo správnou funkci indikačtoru. Indikačtor neuvolňuje žádné známé toxické látky v takovém množství, které by způsobilo zdravotní riziko pro sterilizovaný materiál před, během nebo po procesu sterilizace.

Expirace: 3 roky od data výroby

Klasifikace: ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN ISO 11140-4

Obsah balení: 20 kusů

Aktualizace (datum/iniciály pracovníka): 8/2023/JK



Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com