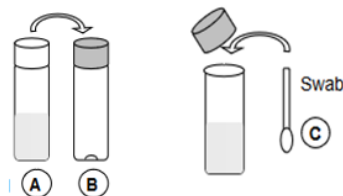


Název výrobku: HemoCheck S**Zařazení:** test účinnosti mytí**Typ testu:** detekce reziduí krevních bílkovin na chirurgických nástrojích**Bližší specifikace:** sada lahvíček a stěrového tamponu, detekční limit 0,1 µg**Typ mytí:** mycí automaty, ruční mytí**Popis výrobku:** testovací sadu tvoří dvě lahvičky a jeden stěrový tampon – setřením referenční plochy nástroje nebo jiného povrchu a vložením do lázně, kterou tvoří směs tekutin obou lahviček dojde při detekci zbytkových krevních bílkovin ke zbarvení**Procesní charakteristika:** mycí procesy je třeba důkladně testovat. Jsou k dispozici různé typy testů mytí použitelné přímo v mycích a dezinfekčních zařízeních (MDZ), tento typ testu je vhodný k testování všech povrchů po provedené očištění – jak strojové, tak ruční.**Fyzikální charakteristika:** lahvička A, lahvička B a stěrový tampon**Skladování:** v uzavřeném originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10-60 % a při teplotě 2°C - 25°C. Chraňte před vlivem chemikálií, před nadměrnou vlhkostí, před znečištěním a teplem**Poznámka:** uchovávejte v původním obalu, zabraňte znečištění tamponu před použitím, výsledky by mohly být zkreslené. Stěrové tampony udržujte až do použití suché! Kontakt s pokožkou může výsledky do značné míry zkreslit! Test proveďte ihned po provedení stěru, aby nemohlo dojít ke zkreslení výsledku!**Expirace:** 18 měsíců od data výroby, viz obal**Klasifikace:** ČSN EN ISO 15883**Obsah balení:** 12 sad -12 lahviček A, 12 lahviček B, 12 stěrových tamponů**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JKPEREG GmbH
Porschestrasse 12
D-84478 Waldkraiburg
+49 8638 84100