

Kód výrobku: MA/5 a MA/6

Distributor:


 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.  
 ČR: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
 SR: [www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)
**Název výrobku:** MagnaAmp®**Zařazení:** biologický indikátor typu self-contained pro kontrolu a validaci sterilizace kapalin vlhkým teplem**Typ testu:** biologický**Bližší specifikace:** skleněné ampulky se spórami *Geobacillus stearothermophilus***Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 118°C - 135°C**Inkubace:** 48 hodin při teplotách 55°C – 60°C**Popis výrobku:** malé skleněné ampulky obsahující médium sójového digesčního bujónu a brom kresolového purpurového pH indikátoru se spórami *Geobacillus stearothermophilus* kmene 7953, množství viz tabulka**Procesní charakteristika:** indikátory se vloží do nádoby s tekutinou v množství, které předepisuje národní legislativa. Nádoba musí být stejné velikosti, jako ostatní nádoby s tekutinou, které se sterilizují. Pokud jsou nádoby různé velikosti, je nutné sledovat každou zvlášť, případně pokud je nádoba stejně velká, nemusí být indikátor do tekutiny ponořen. Ampulky jsou vyrobeny tak, aby klesly na dno nádoby.

Pokud zůstane médium čiré, stejnobarevné, výsledek je uspokojivý, sterilizace byla účinná.

Neexponovaný indikátor se musí projevit zakalením, zežloutnutím.

**Fyzikální charakteristika:** průměr 10 mm x délka 48 mm  
obsah 1 ml**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti

10 - 70 %, chladíte na teplotu +2°C - +8°C

Při skladování chraňte indikátory před přímým slunečním světlem a před vysušením.

**Expirace:** 18 měsíců od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11138-1, 11138-3

každé balení obsahuje certifikát k dané šarži

**Obsah balení:** 50 kusů + 10 ks pro „pozitivní kontrolu“**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JK

Katalogové číslo	Ks/bal	Druh spor/ denzita	Kultivace
MA/5	50+10	<i>Geobacillus stearothermophilus</i> Kmen ATCC 7953, 10 <sup>5</sup>	48 hodin při teplotě 55-60 °C
MA/6	50+10	<i>Geobacillus stearothermophilus</i> Kmen ATCC 7953, 10 <sup>6</sup>	48 hodin při teplotě 55-60 °C



Mesa France  
 2 Rue Auguste Fresnel  
 69680 Chassieu Cedex – France  
 Phone: +33 (0)4 78 90 56 88  
 Email: [mesafrance@mesalabs.com](mailto:mesafrance@mesalabs.com)