

Kód výrobku: 77-09-PL-3-6-15

Distributor:



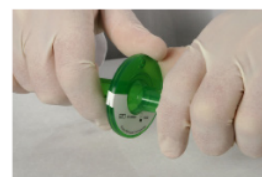
Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.czSR: www.jk-trading.sk**Název výrobku:** ProLine PCD Steam**Zařazení:** biologický indikátor typu non self-contained**Typ testu:** biologický indikátor dutin**Bližší specifikace:** indikační systém PCD s integrovaným bioindikátorem na diskovém nosiči**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 121°C, 132°C, 134°C a 135°C**Inkubace:** 7 dní při teplotách 55°C – 60°C**Popis výrobku:** test vhodný pro validaci sterilizace dutin a hadic v parních sterilizátorech. Biologické osídlení *geobacillus stearothermophilus* kmene 7953, množství 10^6 , je nanášeno na filtračním papíru kruhového tvaru a vloženo do obálky, která umožňuje průnik sterilizačního agens**Procesní charakteristika:** PCD SterLine se vkládá do naříznuté hadice, která reprezentuje obtížnost sterilizace vsázky, dále do sterilizačního obalu takto vytvořená sada se sterilizuje společně se vsázkou. Následnou kultivací se ověří účinnost sterilizace.**Fyzikální charakteristika:** pro průměry hadic 3,175 – 15,875 mm**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 10 - 27°C.

Při skladování chraňte indikátory před přímým slunečním světlem a před vysušením.

Expirace: 2 roky od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11138

každé balení obsahuje certifikát k dané šarži

Obsah balení: 15 kusů**Příslušenství:** TSB (Trypton Soya Broth) – kultivační půda, 6 mm, 100 ks**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 8/2023/JK

Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com