

Kód výrobku: **3FRIN555141, 829211S**  
**3FRIN555143, 82915, 3FRIN555145**

Distributor:

 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.  
 ČR: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
 SR: [www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)

**Název výrobku: Pyromol E test****Zařazení:** test účinnosti mytí /čištění**Typ testu:** detekce reziduí bílkovin v dutinách chirurgických nástrojů

**Bližší specifikace:** lahvička s reagensí a stěrový tampon na bowdenu, detekční limit 0,1 µg pro detekci nerozpustného proteinového rezidua, které vzniká denaturací bílkovin vlivem glutaraldehydu, kyseliny peroctové a chlorových pererátů.

**Typ mytí:** ruční nebo strojové (MDZ)

**Popis výrobku:** testovací sadu tvoří jeden stěrový tampon na bowdenu a lahvička s reagensí. Protáhnutím dutiny nástroje a vložením do lázně, kterou tvoří reagenční tekutina, dojde při detekci zbytkových bílkovin ke zbarvení do modra. V takovém případě je detekované množství minimálně 0,1 µg

**Procesní charakteristika:** mycí procesy je třeba důkladně testovat. Jsou k dispozici různé typy testů mytí použitelné přímo v mycích a dezinfekčních zařízeních (MDZ), tento typ testu je vhodný k testování všech dutin a kanálků nástrojů po provedené očištění – jak strojové, tak ruční.

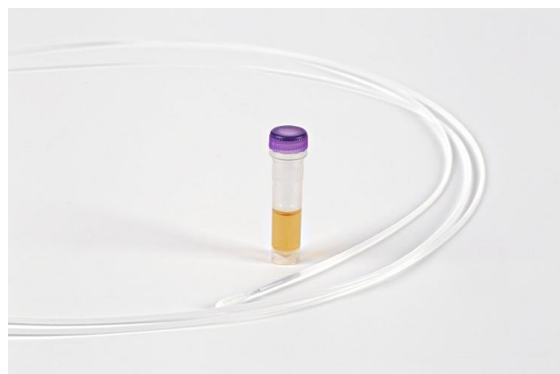
**Fyzikální charakteristika:** lahvička a stěrový tampon na bowdenu

**Skladování:** v uzavřeném originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10-60 % a při teplotě 2°C - 25°C. Chraňte před vlivem chemikálií, před nadměrnou vlhkostí, před přímým světlem a znečištěním, před teplem

**Poznámka:** uchovávejte v původním obalu, zabraňte znečištění tamponu před použitím, výsledky by mohly být zkreslené. Stěrové tampony udržujte až do použití suché! Kontakt s pokožkou může výsledky do značné míry zkreslit! Test proveďte ihned po provedení stěru, aby nemohlo dojít ke zkreslení výsledku! Kontakt s alkalickými látkami může poskytnout falešně pozitivní výsledek. Doporučuje se provést pozitivní i negativní kontrolu šarže, abyste ověřili správnost testovací sady.

**Expirace:** 18 měsíců od data výroby, viz obal**Obsah balení:**

3FRIN555141	6 x Pyromol, 6 x bowden průměr 1,0 mm, délka 200 cm
829211S	6 x Pyromol, 6 x bowden průměr 1,7 mm, délka 230 cm
3FRIN555143	6 x Pyromol, 6 x bowden průměr 2,8 mm, délka 230 cm
82915	6 x Pyromol, 6 x bowden průměr 3,8 mm, délka 230 cm
3FRIN555145	6 x Pyromol, 6 x bowden průměr 5,0 mm, délka 230 cm

**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JK

PEREG GmbH  
 Porschestraße 12  
 D-84478 Waldkraiburg  
 +49 8638 84100