

Kód výrobku: SA/5 a SA/6

Distributor:



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)SR: [www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)**Název výrobku:** SterilAMP®II-5 a 6**Zařazení:** biologický indikátor typu self-contained pro kontrolu a validaci sterilizace kapalin vlhkým teplem**Typ testu:** biologický**Bližší specifikace:** skleněné ampulky se spórami *Geobacillus stearothermophilus***Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 121°C, 132°C, 134°C a 135°C**Inkubace:** 48 hodin při teplotách 55°C – 60°C**Popis výrobku:** malé skleněné ampulky obsahující médium sójového digesčního bujónu a brom kresolového purpurového pH indikátoru se spórami *Geobacillus stearothermophilus* kmene 7953, množství 10<sup>5</sup> nebo 10<sup>6</sup>**Procesní charakteristika:** indikátory se vloží do nádoby s tekutinou v množství, které předepisuje národní legislativa. Nádoba musí být stejné velikosti, jako ostatní nádoby s tekutinou, které se sterilizují. Pokud jsou nádoby různé velikosti, je nutné sledovat každou zvlášť.

Pokud zůstane médium čisté, stejnobarevné, výsledek je uspokojivý, sterilizace byla účinná

Neexponovaný indikátor se musí projevit zakalením, zežloutnutím.

**Fyzikální charakteristika:** průměr 6,5 mm x délka 26,5 mm  
obsah 0,8 ml**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti

10 - 70 %, chladte na teplotu +2°C - +8°C

Při skladování chraňte indikátory před přímým slunečním světlem a před vysušením.

**Expirace:** 18 měsíců od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11138-1, 11138-3

každé balení obsahuje certifikát k dané šarži

**Obsah balení:** 100 kusů + 10 ks pro „pozitivní kontrolu“**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JK

Katalogové číslo	Ks/bal	Druh spor/ denzita	Kultivace
SA/5	100+10	<i>Geobacillus stearothermophilus</i> Kmen ATTC 7953, 10 <sup>5</sup>	48 hodin při teplotě 55-60 °C
SA/6	100+10	<i>Geobacillus stearothermophilus</i> Kmen ATTC 7953, 10 <sup>6</sup>	48 hodin při teplotě 55-60 °C



Mesa France  
2 Rue Auguste Fresnel  
69680 Chassieu Cedex – France  
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88  
Email: [mesafrance@mesalabs.com](mailto:mesafrance@mesalabs.com)