

Kód výrobku: **8293, 8294, 82920, 82921**
82922, 82923, 82924

Distributor:

 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.
 ČR: www.jktrading.cz
 SR: www.jk-trading.sk

Název výrobku: Swab-Aluminium a EndoSwab

Zařazení: test účinnosti mytí/sušení chirurgických nástrojů s dutinami

Typ testu: detekce reziduí vody nebo bílkovin – volitelné příslušenství – stěrové tampony pro použití v dutinách nástrojů

Bližší specifikace: stěrové tampony/štetičky pro použití s testy HydroCheck, HemoCheck nebo Pyromol E

Expozice: postproces

Popis výrobku: tampony na hliníkové nebo plastové tyčince/bowdenu

Procesní charakteristika: tampony se používají suché (pro detekci reziduí vody) nebo navlhčené kapkou sterilní vody, podle typu testu, se kterým jsou používány.

Fyzikální charakteristika:

8293	Swab-Aluminium - 1,0mm	Materiál hliník, délka 14,5 cm	12 ks
8294	Swab-Aluminium - 2,5mm	Pružný plast, délka 14,8 cm	10 ks
82920	EndoSwab -1,1mm	Pružný plast, délka 230 cm	10 ks
82921	EndoSwab -1,7mm	Pružný plast, délka 230 cm	10 ks
82922	EndoSwab -2,8mm	Pružný plast, délka 230 cm	10 ks
82923	EndoSwab -3,8mm	Pružný plast, délka 230 cm	10 ks
82924	EndoSwab -5,0mm	Pružný plast, délka 230 cm	10 ks

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 60 % a při teplotě 2°C - 25°C.

Při skladování po expozici chraňte indikátory před světlem a teplem. Nepoužívané testy nevyjímejte z originálního obalu. Uchovávejte mimo dosah dezinfekčních prostředků a chemických výparů.


POZOR! Nevlhčete!

Poznámka: Pozor, je nutné používat rukavice! Uchovávejte v původním obalu! Chraňte před znečištěním!

Expirace: bez omezení

Obsah balení: viz tabulka

Aktualizace (datum/iniciály pracovníka): 9/2023/JK

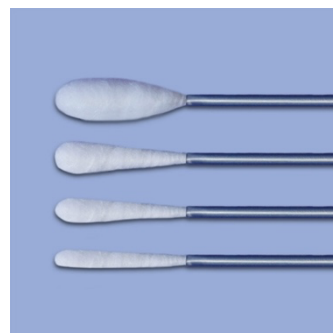

PEREG GmbH
 Porschestraße 12
 D-84478 Waldkraiburg
 +49 8638 84100