

Název výrobku: TOSI® štěrbinový test

Zařazení: test pro kontrolu a validaci mytí a čištění nástrojů v mycích a dezinfekčních zařízeních (MDZ)

Typ testu: kovový proužek s testovací skvrnou

Bližší specifikace: proužek z nerezového materiálu s nanesenou testovací skvrnou, která má podobné složení, jako lidská krev

Expozice: mycí automaty

Popis výrobku: průhledný plastový kryt na nerezovém proužku s testovacím polem tvoří štěrbinu, aby test umožňoval kontrolu průniku mycí lázně i do obtížně dosažitelných míst. Úchyty umožňují snadné a rychlé připevnění testu na síto.

Procesní charakteristika: účinnost mycího procesu se vyhodnocuje podle odmytí testovací skvrny. Veškeré červené zbarvení i celá skvrna musí být úplně umyté a nerezový nosič musí zůstat úplně čistý a lesklý

Fyzikální charakteristika: kovový proužek, odolný plast

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 60 % a při teplotě 2°C - 25°C.

Při skladování po expozici chraňte indikátory před světlem a teplem. Nepoužívané testy nevyjímajte z originálního obalu. Uchovávejte mimo dosah dezinfekčních prostředků a chemických výparů.
POZOR! Nevlhčete!

Poznámka: Indikátor neuvolňuje žádné známé toxické látky v takovém množství, které by způsobilo zdravotní riziko obsluhujícímu personálu

Expirace: 18 měsíců od data výroby, viz obal

Klasifikace: ČSN EN ISO 15883

Obsah balení: 12 kusů

Aktualizace (datum/iniciály pracovníka): 9/2023/JK



PEREG GmbH
Porschestraße 12
D-84478 Waldkraiburg
+49 8638 84100