

Kód výrobku: 77-04-TSB-BP16

Distributor:



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.czSR: www.jk-trading.sk**Název výrobku:** Trypton Soya Broth (TSB)**Zařazení:** biologické indikátory – kultivační půda**Typ testu:** pro použití s biologickým indikátorem**Bližší specifikace:** modifikované kultivační médium na bázi sójového kaseinu pro použití s biologickými indikátory Mesa**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára, Chemiclave, EO, Dry heat (proudící horký vzduch)**Expozice:** dle národních standardů**Inkubace:** viz tabulka

Popis výrobku: Mesa modifikované tryptonosové kultivační médium s bromkresolovou violetí – speciální kultivační médium na bázi sójového kaseinu s bromkresolovou violetí jako indikátorem pH. Je speciálně navrženo pro použití s biologickými indikátory Mesa, dodává se v jednorázových zkumavkách pro snadnou aseptickou manipulaci s výrobkem. Výsledek je vizuální, změnou barvy.

Procesní charakteristika: Vybrané biologické indikátory, které prošly sterilizačním cyklem, se vloží asepticky do kultivačního média. Pokud zůstane médium po celou dobu čisté, výsledek je uspokojivý, sterilizace byla účinná

Fyzikální charakteristika: Zkumavky o průměru 16 mm, délka 100 mm
Objem každé 6,5 ml

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 10 - 27°C.

Při skladování chraňte před přímým slunečním světlem a před vysušením.

Expirace: 1 rok od data výroby**Klasifikace:** každá zkumavka obsahuje číslo šarže a datum expirace**Obsah balení:** 100 kusů**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 8/2023/JK

Typ sterilizace	Doba inkubace
Vlhké teplo (pára)	24 hodin
Chemiclave	72 hodin
EO	7 dní
Dry heat (proudící horký vzduch)	7 dní



Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com