
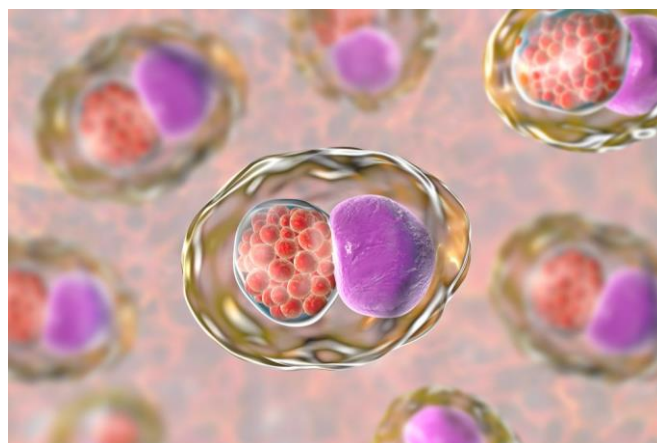


# DIAQUICK


## Chlamydia trachomatis

screeningový Ag test pro rychlou diagnostiku  
katalogové číslo **Z98226CE**

Test lze provádět i v ordinaci lékaře-specialisty. Při testování stěru není potřeba přístrojového vybavení. Při provedení testu ze vzorku moče použijte malou centrifugu.

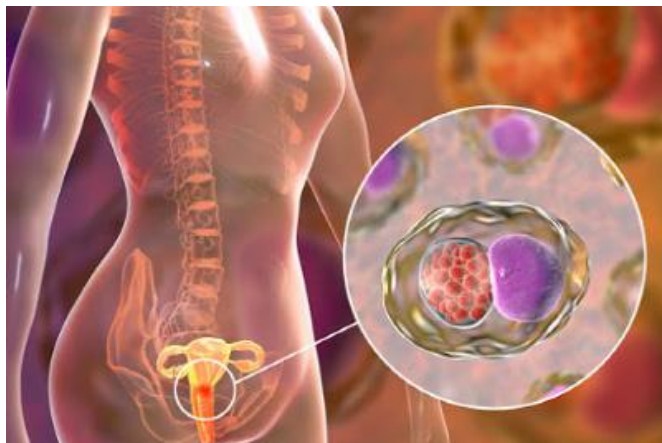

### Princip testu

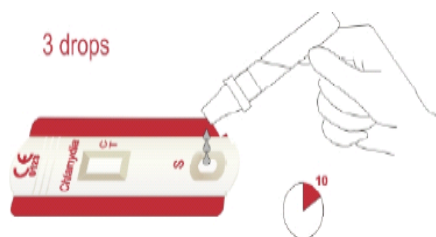

**Vzorek:** U žen stěr z endocervikálního kanálku. U mužů stěr z uretry, nebo vzorek ranní moče.

**Postup:** Antigen *Chlamydia trachomatis* se extrahuje ze vzorku do směsi činidel ve zkumavce. Víčko zkumavky je opatřeno kapátkem, kterým se aplikují 3 kapky vzorku na testovací kazetku. Do 10 minut se vytvoří barevné linky, podle kterých se vizuálně hodnotí přítomnost antigenu *Chlamydia trachomatis*.

### Charakteristika testu ve srovnání s PCR (dle firemních materiálů)

	Stěr z cervixu	Stěr z uretry	Moč u mužů
Relativní senzitivita	90,0%	80,9%	92,3%
Relativní specifita	96,5%	96,5%	>99,9%
Správnost	94,8%	90,2%	97,2%

### Balení

DIAQUICK Chlamydia test card Z98226CE obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, označené lahvičky s roztoky A,B, 20 ks odběrových tamponů pro ženy, 20 ks extrakčních zkumavek s kapátkem. Český návod je přiložen.

*Cena na vyžádání*



Objednávky ČR:  
**JK-Trading s.r.o.**,  
Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5-Zličín  
tel.: 257 220 760  
email: [praha@jktrading.cz](mailto:praha@jktrading.cz)

Objednávky SK:  
**JK-Trading s.r.o.**,  
Dlhá 1264/43,  
900 31 Stupava  
tel.: 0907 670 888,0264 776 790  
email: [jk-trading@jk-trading.sk](mailto:jk-trading@jk-trading.sk)

Více informací:  
Ing. Kryl 777 929 604  
Ing. Žurová: 777 929 623  
[www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
[www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)