


COVID-19 a Influenza A+B Antigen Combo rychlý test (nasofaryngeální výtěr) 014L419

Rychlý antigenový test ke kvalitativní detekci virů COVID-19 a chřipky A+B ve vzorcích nasofaryngeálního stěru v jednom kroku. Pouze pro profesionální použití.

Postup a odečítání výsledku

Odebraný vzorek se vyextrahuje do zkumavky s extrakčním pufr, kápne se na kazetku do jamky pro vzorek a po 15 minutách se vizuálně odečte výsledek.

Podrobnější informace viz návod.

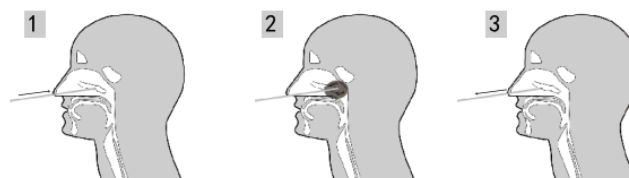

Souprava obsahuje

- Testovací kazety
- Extrakční pufr
- Extrakční zkumavky
- Uzávěry na extrakční zkumavky
- Příbalový leták
- Pracovní stojánek
- Výtěrové tampony



Senzitivita, specifická a přesnost stanovení.

Vzorky získané od pacientů nasofaryngeálním stěrem byly testovány ulti med COVID-19 a Influenza A+B Antigen Combo rychlým testem a RT-PCR metodou. Výsledky jsou uvedeny v tabulce.

	COVID	Influenza A	Influenza B
Relativní senzitivita	85.0% (95%CI*: 62.1%~96.8%)	94.1% (95%CI*: 71.3%~99.9%)	91.7% (95%CI*: 61.5%~99.8%)
Relativní specifická	98.3% (95%CI*: 91.1%~>99.9%)	98.4% (95%CI*: 91.5%~>99.9%)	100.0% (95%CI*: 95.7%~100.0%)
Přesnost	95.0% (95%CI*: 87.7%~98.6%)	97.5% (95%CI*: 91.3%~99.7%)	98.8% (95%CI*: 93.2%~>99.9%)

Certifikace : 

Cena: 254,- Kč bez 21% DPH (5.080,-Kč/balení 20 testů).
307,- Kč s 21% DPH (6.147,-Kč/balení 20 testů).