

Návod k použití

Název výrobku:

PMS Steripack obalové archy

Popis výrobku:

PMS Steripack krepové papíry WPW, WPB, WPG a obalové archy SMSL a SMSH

Krepové papíry obsahují celulózu, zatímco netkané produkty SMSL a SMSH jsou vyrobeny ze 100% polypropylenového materiálu

Tyto výrobky jsou v souladu s normami EN ISO 11607 a EN 868-2.

Účel použití:

K použití jako sterilizační obal pro jiné zdravotnické prostředky, které mají být sterilizovány

Návod k použití:

- 1- V závislosti na velikosti se používá vhodná velikost balicího archu
- 2- Druh balicího archu se určí podle hmotnosti a druhu materiálu.
- 3- Aby se zabránilo pronikání mikroorganismů a pro bezpečnější a pevnější balení, balí se dvakrát (u krepového papíru)
- 4- Balení musí být provedeno tak, jak je uvedeno v národních standardech
- 5- Ostré konce nástrojů zakryjte chráničem, zabráníte tak propíchnutí popř. protrhnutí
- 6- Balíky fixujte páskami s indikátory nebo bez indikátorů, každý balík musí být opatřen procesovým indikátorem
- 7- Uvnitř balení by měl být dle národních standardů umístěn indikátorový proužek pro kontrolu účinnosti sterilizace
- 8- Balicí archy krepu jsou vhodné pro parní sterilizaci při 121°C a 134°C – krep, dvě vrstvy
- 9- Balicí archy SMSL nebo SMSH jsou vhodné pro páru, etylenoxid, formaldehyd, plazmu (bez celulózy) a gama sterilizaci.
- 10- Balicí archy jsou na jedno použití.
- 11- Po sterilizaci je třeba dbát na to, aby se obaly nepoškodily.
- 12- Sterilizované balíky musí být skladovány ve speciálních místnostech na policích.
- 13- Obaly je třeba chránit před přímým slunečním zářením, vlhkostí a kontaminovanými místy
- 14- Sterilizované balíčky zachovávají bakteriální bariérové vlastnosti – viz národní legislativa
- 15- Před použitím musí být nejprve odstraněn vnější obal, poté se na pracovišti odstraní i vnitřní obal.

Číslo šarže:

Každé balení PMS Steripack archů je opatřeno číslem LOT vytištěným na štítku vnitřního obalu a štítku přepravního kartonu. Číslo šarže umožňuje sledovatelnost produktu během výrobního procesu. Pokud existuje nějaká stížnost nebo zpětná vazba, musíte uložit číslo ŠARŽE a poskytnout jeho obrázek.

Skladování:

PMS Steripack archy musí být skladovány v původním obalu při max. +35°C a max. 70% relativní vlhkosti vzduchu. Balicí archy by měly být chráněny před přímým světlem a nadměrnou vlhkostí. Pokud je balicí arch mokrá, nepoužívejte jej a zlikvidujte jej podle pokynů.

Použitelnost:

- 1- Doba použitelnosti (předsterilizační použití) archů PMS Steripack je 5 (pět) let od data výroby za doporučených podmínek skladování a manipulace. Výrobek musí být spotřebován do 5 let od data výroby. Datum expirace a také datum výroby jsou vytištěny na štítku vnitřního obalu a štítku přepravního kartonu.
- 2- Sterilizované obaly zachovávají vlastnosti bakteriální bariéry po dobu 6 měsíců při skladování za doporučených podmínek, viz národní legislativa. Dojde-li v souvislosti s výrobkem k jakémukoli závažnému incidentu, musí uživatel informovat výrobce a má právo nahlásit příslušnému orgánu členského státu.

Likvidace:

Použité nebo poškozené balicí archy vhadzujte do autoklávatelných biologicky zabezpečených pytlů, nikoli do běžných odpadních pytlů.

PMS Tibbi Cihazlar Teknolojisi San. Ve Tic. TAK JAKO., Karaduvar Mah. Serbest Bolge, 11. Cad. č. 46,
Adresa: 3197520954, Akdeniz | 33020 Mersin/TURECKO T:+903242387042 | F:+902386549 www.pmsmedikal.com |

pms@pmsmedikal.com

VYROBENO V TURECKU



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.cz

SR: www.jk-trading.sk

Překlad: JK/12.2022