

PMS Steripack sterilizační role a sáčky

Zdravotnické prostředky určené k zabalení nástrojů/jiných zdravotnických prostředků za účelem sterilizace.

Objednací kódy:

FL +rozměr, FP +rozměr, GS +rozměr, GP +rozměr, KP +rozměr

Tato specifikace je platná pro všechny rozměry a typy sáčků a rolí PMS Steripack.

Popis výrobku:

PMS/Steripack role a sáčky jsou vyrobeny z pětivrstvé fólie PET/PP a jakostního zdravotnického papíru 60 g/m².

Procesové indikátory (chemické indikátory typu I) jsou nanесeny na vnějším povrchu a vypovídají o provedené sterilizaci materiálu, zabaleného uvnitř. Jsou vyrobeny z netoxického inkoustu na vodní bázi.

Indikátory jsou značeny mezinárodními zkratkami tak, jak je uvedeno v odpovídajících normách: **STEAM pro páru (barevná změna z růžové na hnědou), EO pro etylenoxidovou sterilizaci (barevná změna ze zelené na žlutou) a dále FO/FORM pro formaldehydovou sterilizaci (barevná změna z růžové na zelenou).**

Tyto obaly zajišťují požadovanou mikrobiální bariéru a jsou zařazeny mezi zdravotnické prostředky třídy I.

Návod k použití:

1. PMS/Steripack sáčky jsou určeny k okamžitému použití. PMS/Steripack role je třeba nejprve zkrátit na potřebnou délku a jednu ze stran svařit (zatavit) pomocí svářečky sterilizačních obalů.
2. Nepoužívejte obal, je-li poškozen. Nepoužívejte obal opakovaně.
3. Zabezpečte ostré části nástrojů pomocí krytek, abyste tak zabránili protržení či rozříznutí obalu.
4. Vložte nástroj ke sterilizaci do obalu. Nikdy obal neplňte více, než ze 75 % jeho kapacity.
5. Vždy ponechejte mezi nástrojem a svárem dostatečnou mezeru kolem 1,5 cm, abyste tak zajistili dostatečný průchod vzduchu.
6. Před konečným uzavřením obalu prosím odstraňte co nejvíce vzduchu. Obaly uzavírejte vždy správně validovaným a kalibrovaným přístrojem a v souladu s doporučením výrobce. Pevnost sváru musí být zvolena tak, aby mohl být při otevírání využit tzv peel efekt ke správnému otevření obalu. Samolepicí sáčky uzavírejte k tomu určenou lepicí páskou, která je na jedné straně již umístěna a je kryta proužkem papíru.
7. Vyvarujte se napínat či jinak deformovat právě vytvořený ještě teplý svár. Plňte obal v horizontální poloze na hladké ploše.
8. Při vkládání jednotlivých sáčků do koše sterilizátoru dbejte na to, abyste kladli vždy papír na papír a fólii na fólii, aby byl zajištěn bezproblémový průchod sterilizačního média.
9. Jednotlivé balíčky kladte do síta svisle, a ne příliš na těsnost, abyste mezi nimi volně protáhli ruku.
10. Spustte sterilizační program podle obvyklého režimu.
11. Při vyjímání balíčků ze sterilizátoru pracujte opatrně, abyste obal nepoškodili. Vystерilizovaný materiál ukládejte ve zvláštním oddělení, kde nepřijde do styku se slunečním zářením, vodou ani jinými tekutinami.
12. Nepoužívejte materiál, je-li po sterilizaci vlhký. Pro opakovanou sterilizaci použijte nový obal.
13. Pro otevření použijte palec a ukazováček jedné ruky k uchopení fólie a palec a ukazováček druhé ruky k uchopení papíru. Vždy obal otevírejte směrem označeným šipkou. Pro správné aseptické otevření sáčku je třeba pracovat rozvázně, nikdy trhnutím.

Podmínky pro skladování a doba použitelnosti:

Skladujte při teplotě do 35°C a vlhkosti vzduchu maximálně 70 %. Při těchto podmínkách je doba použitelnosti 5 let.

Obaly nesmí být vystaveny, ať už po sterilizaci nebo před ní, přímému slunečnímu záření, vlhku, nepřiměřenému průvanu. Jakmile papír obalu navlhne, nesmí být již obal použit.

Charakteristika obalů

3-násobný svár pro optimální odolnost, 5-ti vrstvá fólie odolná proti protržení, jednoduchý a čistý peel efekt k aseptickému otevření, prověřená antimikrobiální bariéra, inkoust indikátoru odolný proti vodě, jasná barevná změna indikátorů, netoxická činidla, ekonomické použití, široké spektrum velikostí

Soulad s mezinárodními standardy

Všechny výrobky PMS Steripack, sterilizační role a sáčky, jsou vyráběny dle mezinárodních standardů: EN 868-3, EN868-5, ISO 11607, ISO 11141, Směrnice 93/42 EEC pro zdravotnické prostředky v posledním znění. Nově EU MDR 2017/745.

PMS Medikal Amb.San.TIC.LTD.STI 70

+35oC Dr.Ayhan Aybar Cad. 6 Sk.,

No.:11 Sorbest Bölge Mersin -

TÜRKIYE Tel.: +90 324 238 70 42 (pbx)

Fax: +90 324 238 6549 E-mail:

pms@pmsmedikal.com Web:

www.pmsmedikal.com

Překlad: JK/12.2022



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.cz

SR: www.jk-trading.sk