



Katalogové číslo: 194002



NADAL[®] pH Test

**NADAL[®] pH Test je rychlý test pro měření pH vaginálního sekretu.
Slouží jako pomůcka pro identifikaci vaginálních infekcí.
Pro profesionální in vitro diagnostiku.**

Fyziologická hodnota vaginálního pH je kyselá a pohybuje se v rozpětí 3,8 až 4,4. Kyselé prostředí chrání vagínu před kolonizací patogeny, čímž se snižuje výskyt vaginálních infekcí. Zvýšení hodnoty vaginálního pH může být způsobeno netypickou bakteriální kolonizací pochvy, vaginální infekcí, nebo pohlavně přenosnými chorobami, ale i PROM (předčasné protržení membrán), nedostatkem estrogenu, antibiotickou terapií...



Testování a odečet výsledku.

Odběr vzorku se provádí přímo s testovacím aplikátorem ze zadní strany poševní stěny z hloubky cca 1-3 cm. Po navlhčení měřící oblasti testu dojde ke změně barvy. Výsledek se odečte oproti barevné škále dodávané v testovací soupravě.

Balení

Souprava obsahuje vše potřebné k provedení testu (50 hygienicky balených aplikátorů NADAL[®] pH Test, příbalový leták a barevnou stupnici pH pro odečítání výsledku).

Cena na vyžádání.



Objednávky ČR:
JK-Trading s.r.o.,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Objednávky SK:
JK-Trading s.r.o.,
Dlhá 1264/43,
900 31 Stupava
tel.: 0907 670 888, 0264 776 790
email: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:
Ing. Kryl 777 929 604
Ing. Žúrová: 777 929 623
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk

Platnost od 1.1.2023