



## NADAL<sup>®</sup> COVID-19 IgM/IgG test

screeningový test pro rychlou diagnostiku protilátek proti SARS-CoV-2  
katalogové číslo 243001N-10

EC Prohlášení o shodě podle Nařízení 98/79/EC, IVD, příloha III

Test nevyžaduje zvláštní školení ani kvalifikaci. Při testování není potřeba přístrojového vybavení. Test je určený pouze pro profesionální použití. Provedení i v ordinaci lékaře.

Test není určen pro sebetestování.

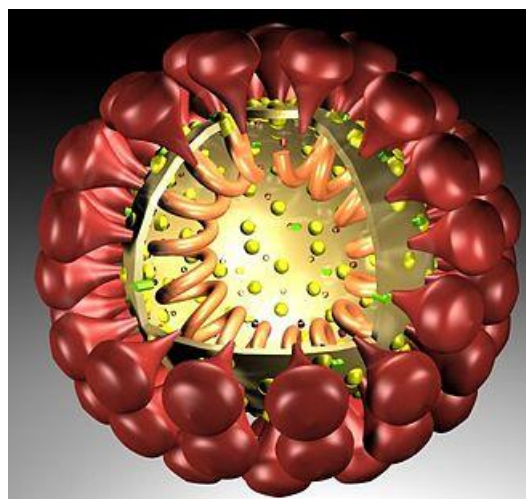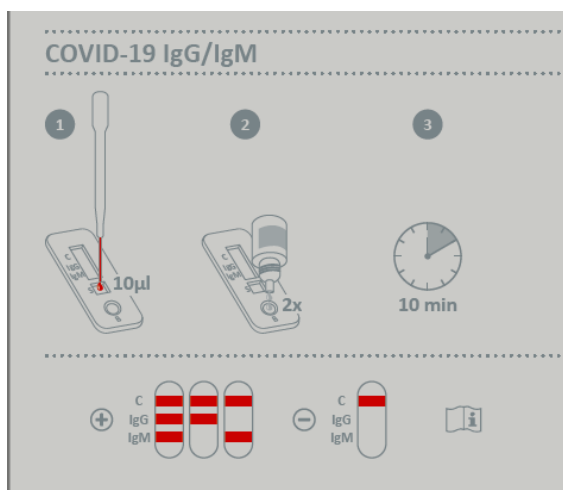

### Princip testu

**Test:** Kazetový imunochromatografický test s výsledkem do 10 minut.

Pro kvalitativní detekci anti-SARS-CoV-2 IgG a IgM v lidské **plné krvi, séru nebo plazmě** symptomatických pacientů.

**Použití:** Test je určen k použití jako pomoc při diagnostice primárních a možných sekundárních SARSCoV-2 infekcí.

V raných stádiích infekce (3 až 7 dní) anti-SARS-CoV-2 IgG a IgM mohou být pod detekční limit testu

### Charakteristika testu ve srovnání s PCR (\*95% interval spolehlivosti)

#### IgG protilátky

Diagnostická citlivost: 97,4% (86,2% - 99,9%) \*  
Diagnostická specifická: 99,3% (96,2% - 99,9%) \*  
Celková shoda: 98,9% (96,1% - 99,9%) \*

#### IgM protilátky

Diagnostická citlivost: 86,8% (71,9% - 95,6%) \*  
Diagnostická specifická: 98,6% (95% - 99,8%) \*  
Celková shoda: 96,1% (92,2% - 98,4%) \*

### Zkřížené reakce

Nebyla pozorována zkřížená reakce při testování proti pozitivním vzorkům virusu chřipky typu A, B, RSV, anti-adenovirusu, anti-HBsAg, anti-T.pallidum, anti- H.pylori, anti-HIV a anti-HCV.



#### Objednávky :

**JK-Trading s.r.o.**, Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5  
tel.: 257 220 760  
email: [paha@jktrading.cz](mailto:paha@jktrading.cz)

#### Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604  
Ing. Ernestová: 777 477 308  
Morava – Ing. Žůrová: 777 929 623

[www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)