




a
společnost JK-Trading, s. r.o.,
dovozce In vitro diagnostik a vakcín v ČR,
Vám představuje:

hCG screeningový test

kat.č. 001L041

pro kvalitativní specifické stanovení lidského choriogonadotropinu t.j. ke zjištění časného těhotenství od 7-10 dne, s citlivostí od 25 mIU/ml.

Test lze provádět v ordinaci praktického lékaře, ze vzorku moče bez potřeby dalšího laboratorního vybavení. Test lze provést i ze séra, kdy je třeba malé centrifugy.

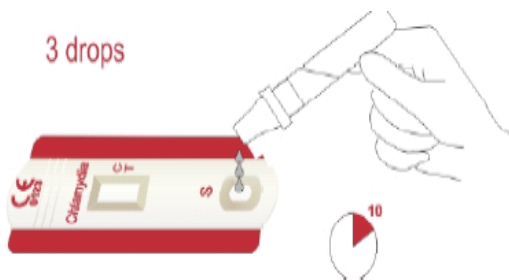

Princip testu: Test využívá kombinaci protilátek, obsahujících monoklonální hCG protilátku k selektivní detekci zvýšených hladin hCG. Reakce je spuštěna přidáním séra, nebo moči do označené jamky pro vzorek na kazetě. Vzorek migruje membránou a reaguje s barevně značeným konjugátem.

Pozitivní vzorek reaguje se specifickou barevně značenou protilátkou proti hCG a vytváří červenou

linii v místě testu označeném T. Nepřítomnost barevné linie v tomto místě znamená negativní výsledek.

Charakteristika testu: dle firemních materiálů:

Senzitivita a specificita: Test ulti med detekuje hCG ve vzorku séra nebo moči při koncentraci hCG= 25mIU/ml, nebo vyšší. Test je standardizován podle WHO standardů.

Možnost zkřížených reakcí byla ověřena přidávkem 300 mIU LH, 1000 mIU FSH, 1000 IU TSH jak k pozitivním, tak negativním vzorkům hCG. Nebyly pozorovány žádné zkřížené reakce.

Interference: Byly ověřeny možnosti interference sloučeninami, které se mohou vyskytovat ve vzorcích séra nebo moči: Acetaminophen 20mg/ml, Kys.acetylsalicylová 20mg/ml, Kys. askorbová 20 mg/ml, Atropin 20mg/ml, Bilirubin 40 mg/dl (706,7 umol/l), Triglyceridy 1200mg/dl (13,5mmol/l), Kofein 20mg/ml, kys.gentisová 20mg/ml. Žádná z uvedených sloučenin neovlivnila výsledky jak pozitivních tak negativních vzorků hCG.

Balení, expirace, návody a další testy:

Balení po 1 ks, Český návod je součástí dodávky. Testy jsou dodávány přibližně s roční expirací.

Další nabídku rychlých testů včetně návodů najdete na [http:// www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz) / Laboratorní diagnostika / Rychlé testy..

Cena na vyžádání



Objednávky ČR:
JK-Trading s.r.o.,
 Křivatcová 421/5,
 155 21 Praha 5-Zličín
 tel.: 257 220 760
 email: paha@jktrading.cz

Objednávky SK:
JK-Trading s.r.o.,
 Dlhá 1264/43,
 900 31 Stupava
 tel.: 0907 670 888,0264 776 790
 email: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:
 Ing. Kryl 777 929 604
 Ing. Žůrová: 777 929 623
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk